

# MANUAL DO SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO

## MANUAL DO INSTALADOR


# TELEDIAGNÓSTICO

## ECG BIONET

FEVEREIRO DE 2020



1. Acesse o link <http://www.telessaude.hc.ufmg.br/suporte/Sigtel/> e faça o download do aplicativo Telediagnostico.exe.

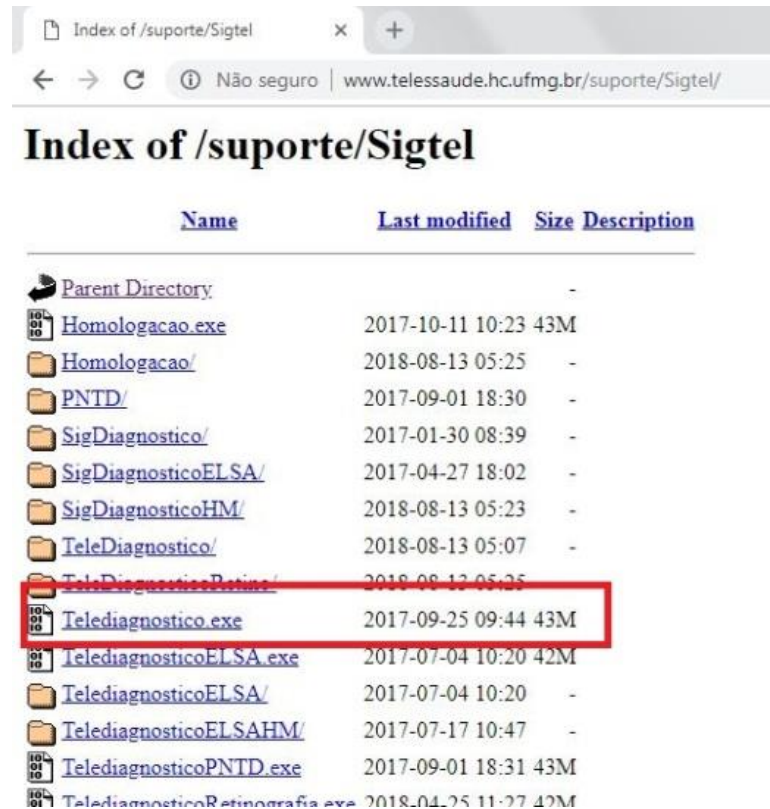


2. Execute o aplicativo “Telediagnostico.exe”.




3. Clique em “Avançar”.




4. Clique em “Avançar”.

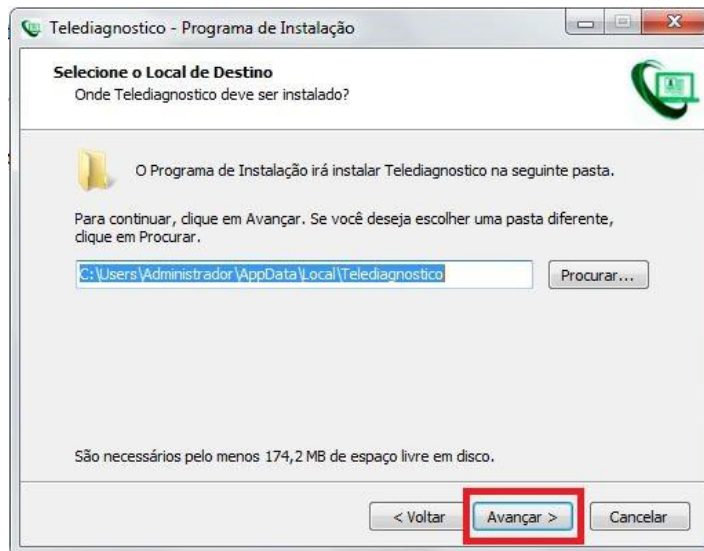


5. Clique em “Avançar”.

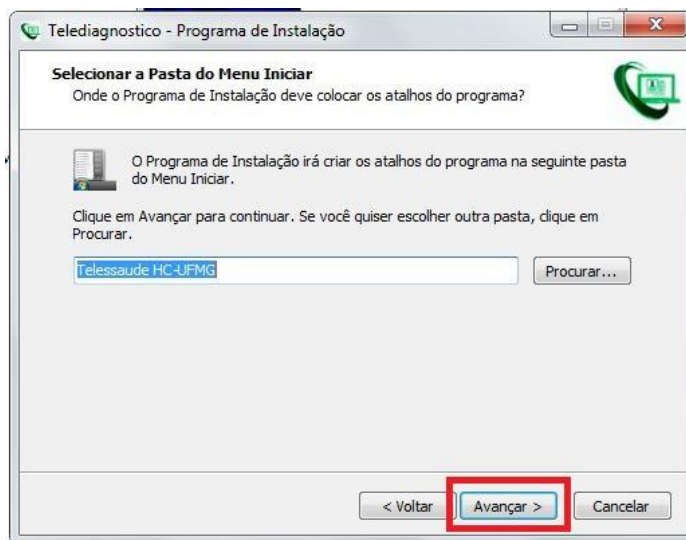


6. Clique em “Avançar”..

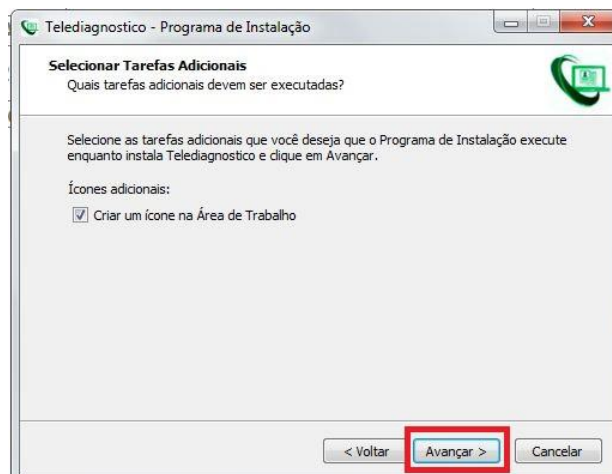

7. Clique em “Instalar”.

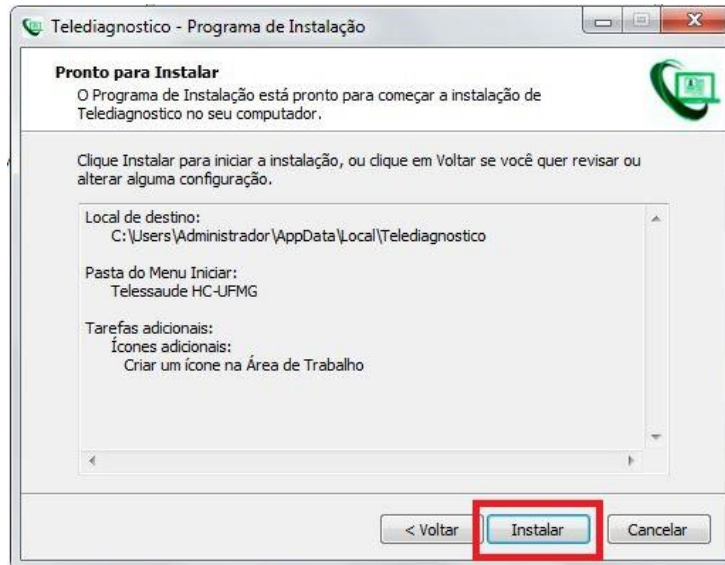

8. Clique em “Concluir”.

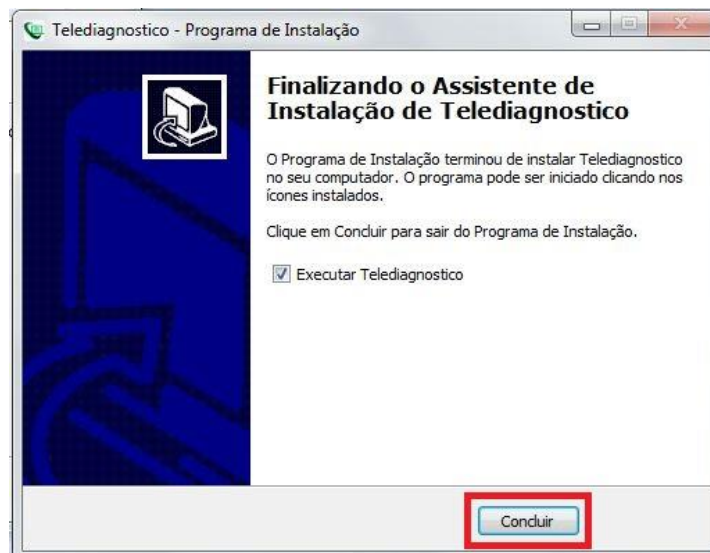


9. Abra o Telediagnostico clicando no ícone na área de trabalho.




# Instalar EKGVIEWER


10. Digite seu login e senha.

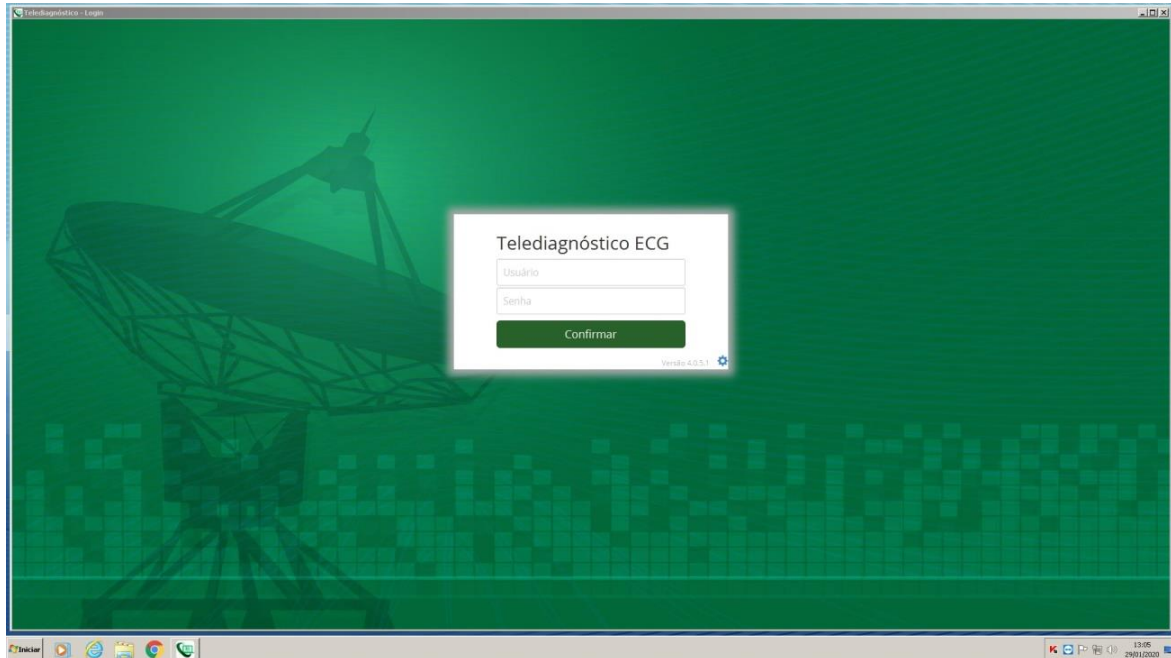

11. Selecionar o ECG PC instalado.

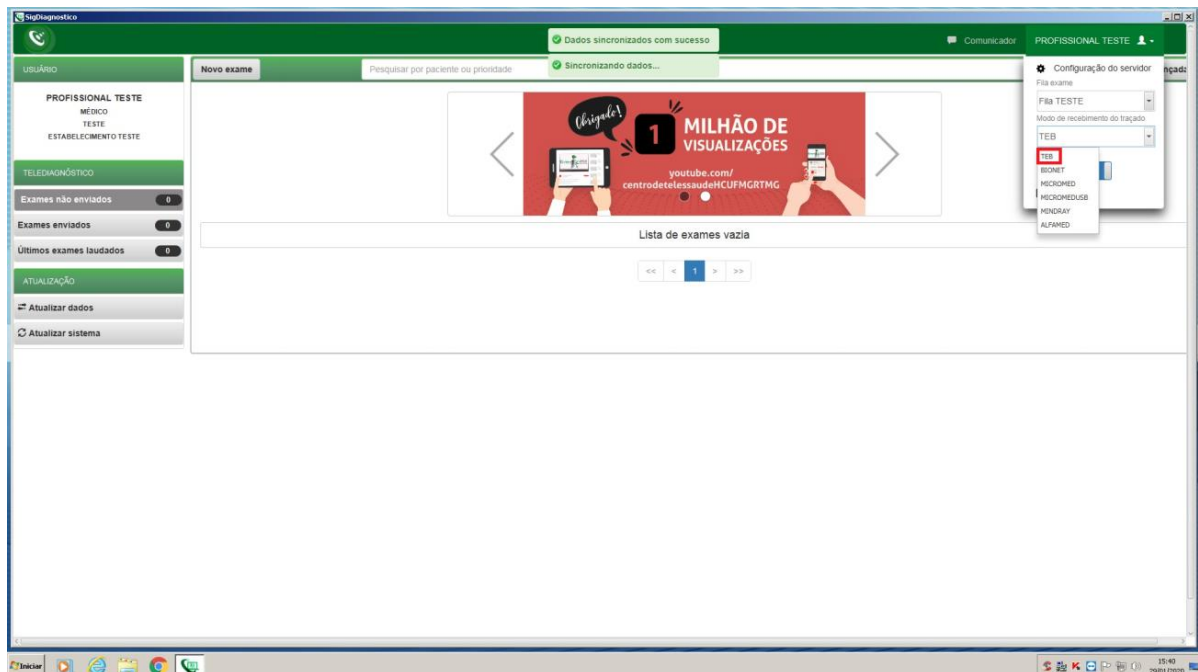

## 12. Configurações a serem feitas para o Bionet

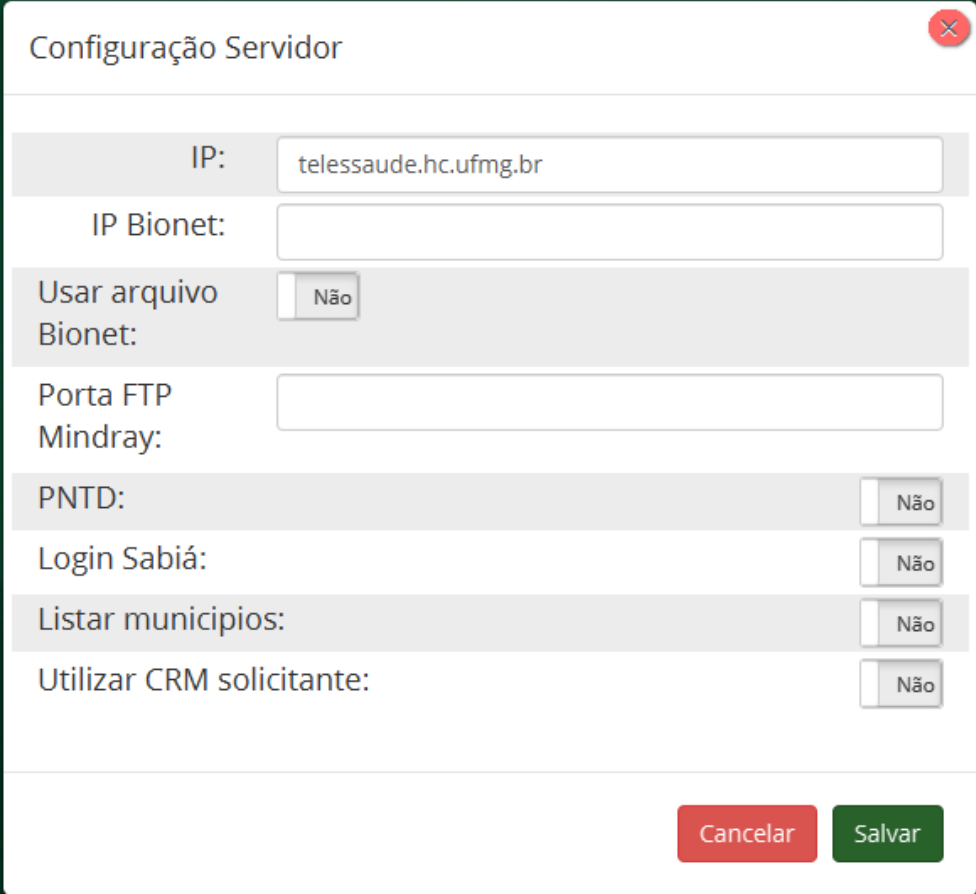

Configuração Servidor

IP:

IP Bionet:

Usar arquivo Bionet:

Porta FTP Mindray:

PNTD:

Login Sabiá:

Listar municípios:

Utilizar CRM solicitante:

## 13. Clique em "Salvar".



## Configuração Servidor



IP:

IP Bionet:

Usar arquivo Bionet:

Porta FTP Mindray:

PNTD:

Login Sabiá:

Listar municípios:

Utilizar CRM solicitante:


Cancelar

Salvar




## INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO BIONET

1. Ligue o equipamento **CardioCare** na energia e depois ao computador usando o cabo de rede com o adaptador USB/RJ45 ligado ao PC.
2. Após o equipamento conectado ao computador, configure o adaptador USB/RJ45 e o **CardioCare** da seguinte maneira:
3. Clique em “Menu” para abrir as opções do **CardioCare**.

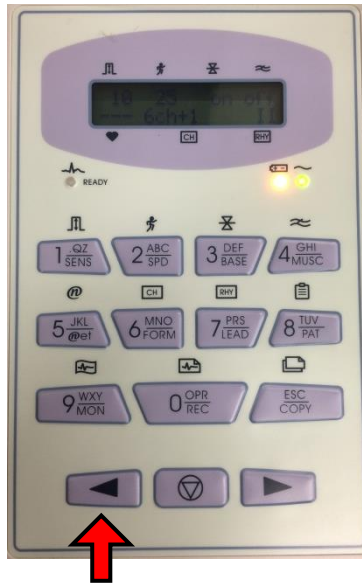


4. Após abrir as opções, clique na setinha até chegar em “Ajustes SIST”. Depois clique em “Menu” para abrir.

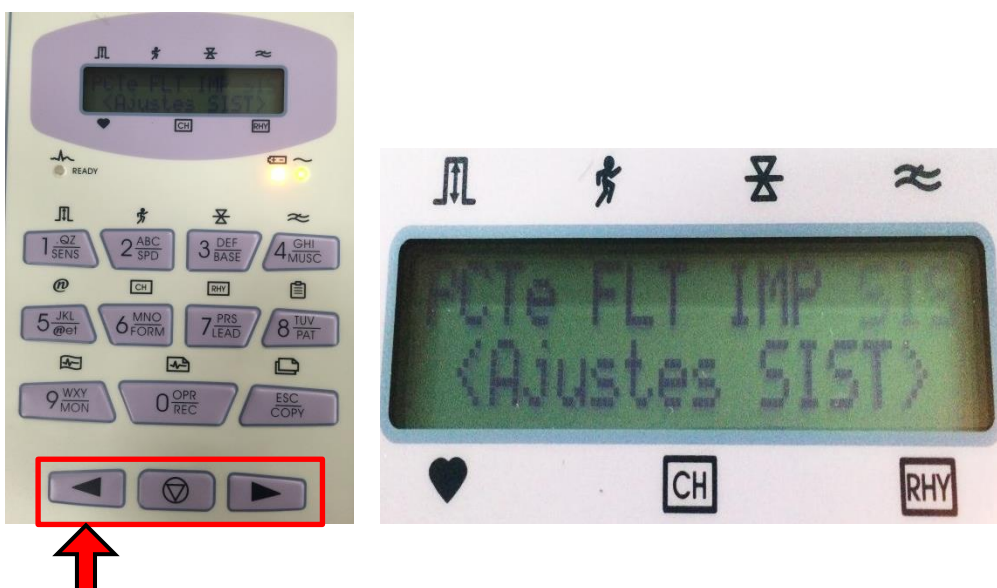





5. Após abrir “Ajustes SIST”, abrirá a seguinte tela, mostrando o “IP – MASK – GW – DB”.


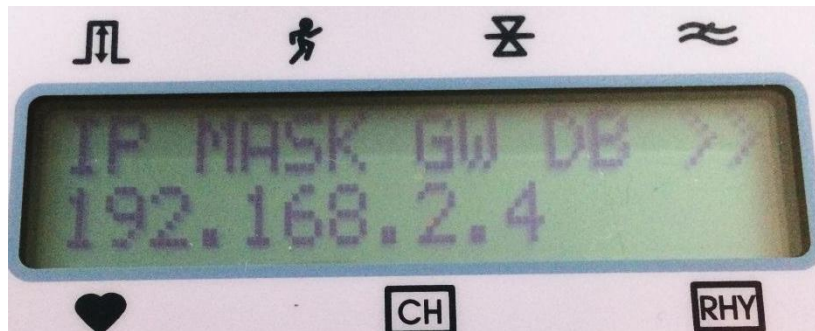


6. Aberto, você fara a configuração que ficará praticamente a mesma configuração do adaptador USB/RJ45, sendo diferenciado apenas o “IP”. Para alterar use as setinhas e para selecionar o botão menu no **CardioCare**.


7. O “MASK” ficara o mesmo da “Máscara de sub-rede”

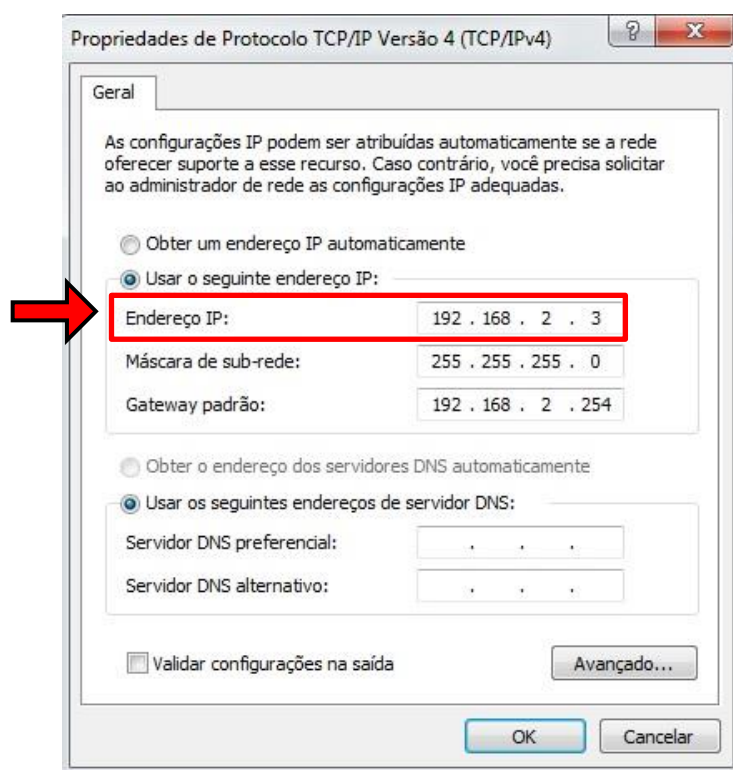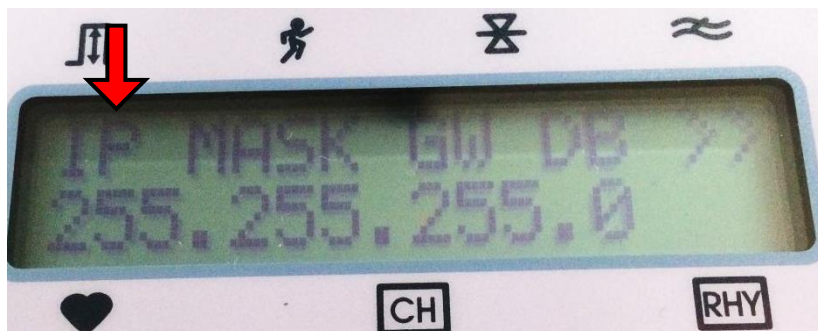


8. O “GW” ficará o mesmo do “Gateway padrão”

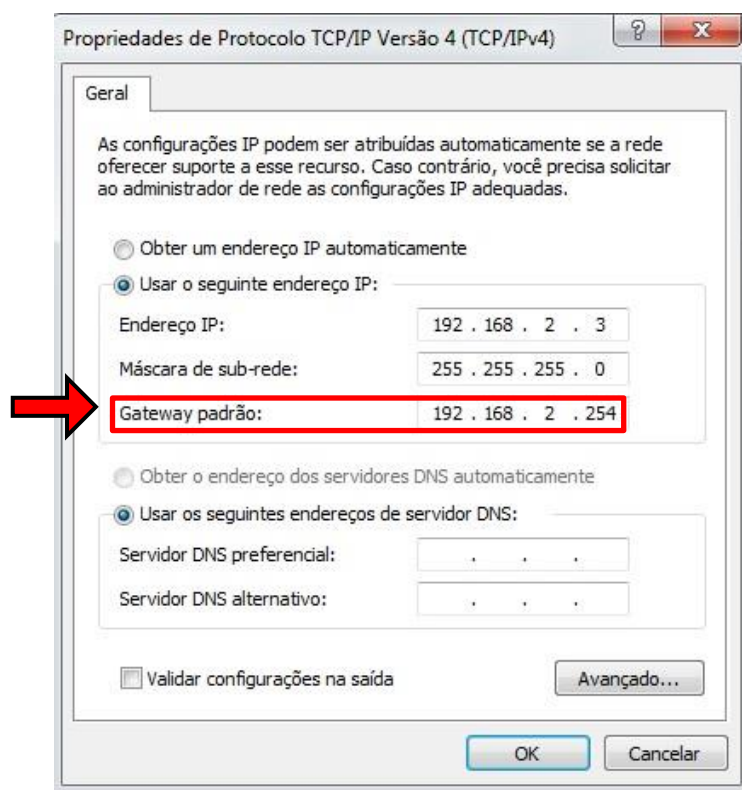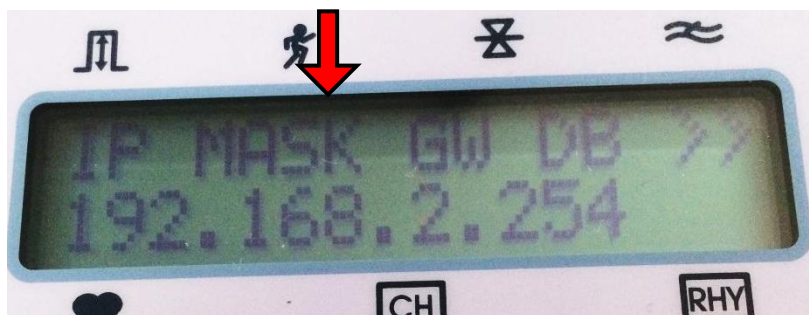


9. O “DB” ficará o mesmo do “Endereço IP” do Adaptador USB/RJ45.

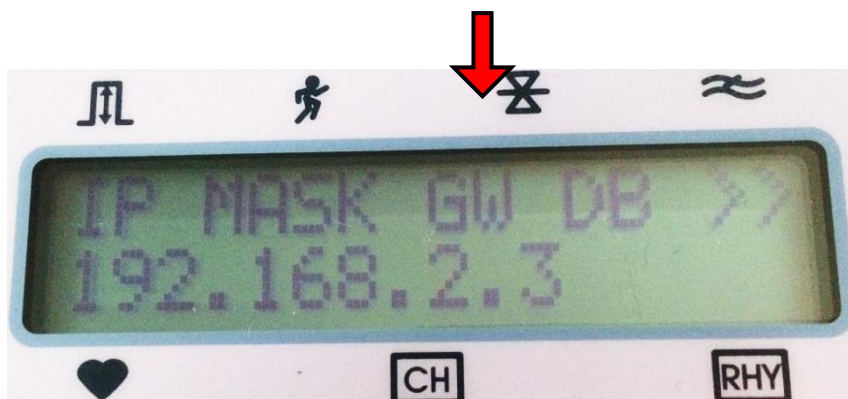

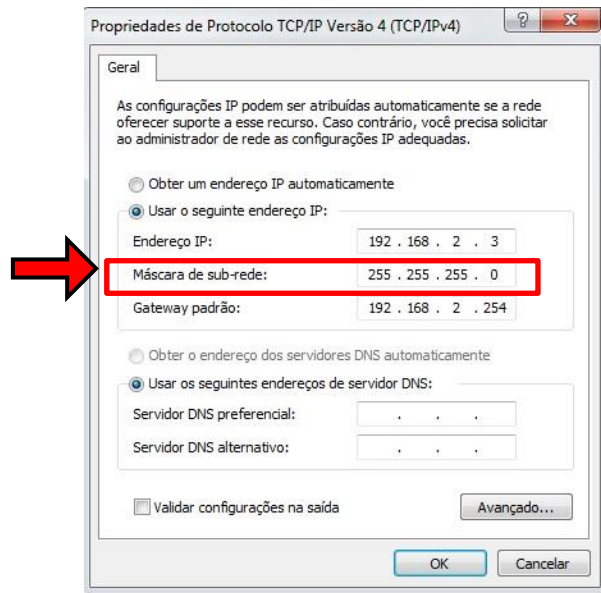

10. Como informado, o único que ficará diferente da configuração do Adaptador USB/RJ45 na configuração do **CardioCare** será o "IP", como por exemplo.

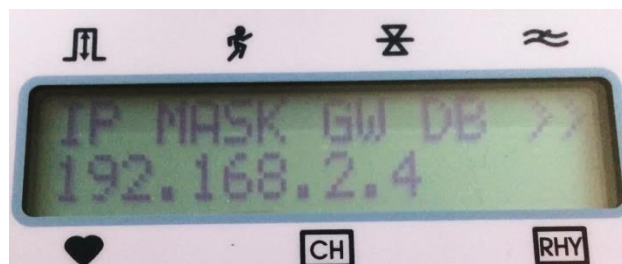

11. Concluída a configuração aperte "ESC" no **CardioCare** para voltar ao início.



12. Configurado o **CardioCare** e o Adaptador USB/RJ45, abra a pasta "Bionet" e clique em "software\_eletrocardiografo.exe" e instale o programa.