

MANUAL DO SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO


MANUAL DO INSTALADOR

TELEDIAGNÓSTICO ECG MICROMED USB

FEVEREIRO DE 2020



1. Acesse o link <http://www.telessaude.hc.ufmg.br/suporte/Sigtel/> e faça o download do aplicativo Telediagnostico.exe.

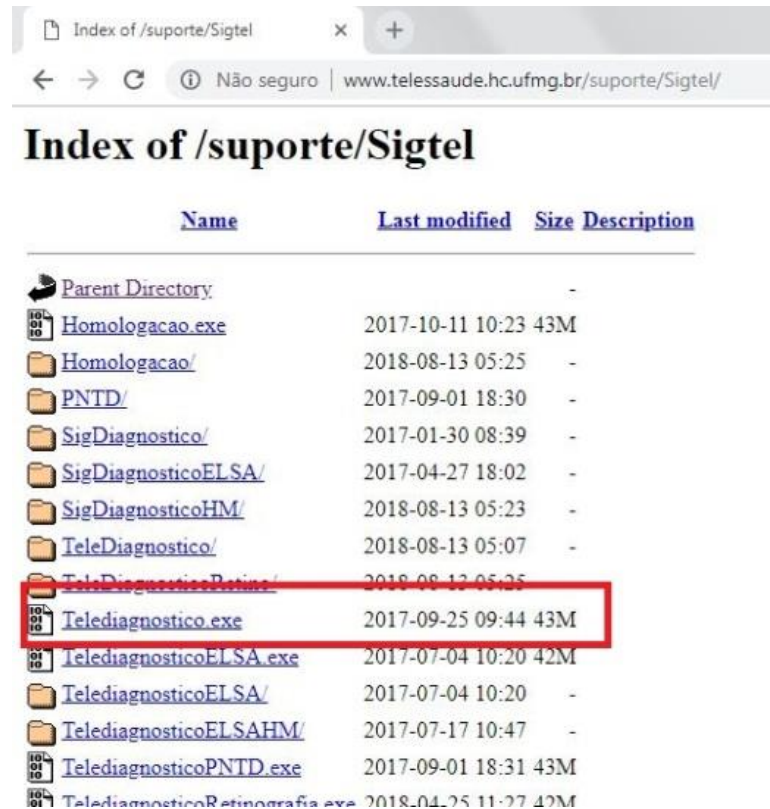


2. Execute o aplicativo “Telediagnostico.exe”.




3. Clique em “Avançar”.




4. Clique em “Avançar”.

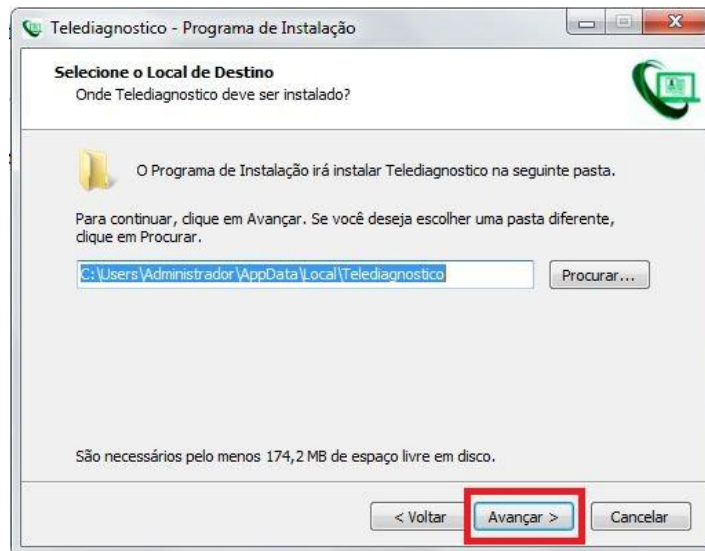


5. Clique em “Avançar”.

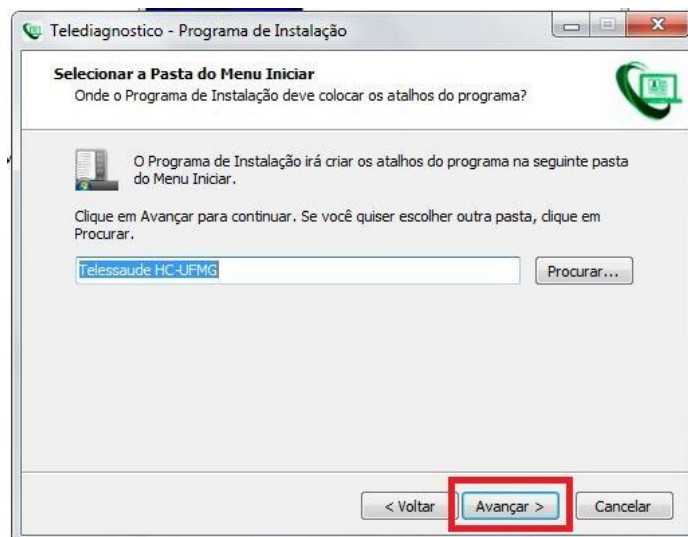

6. Clique em “Avançar”.

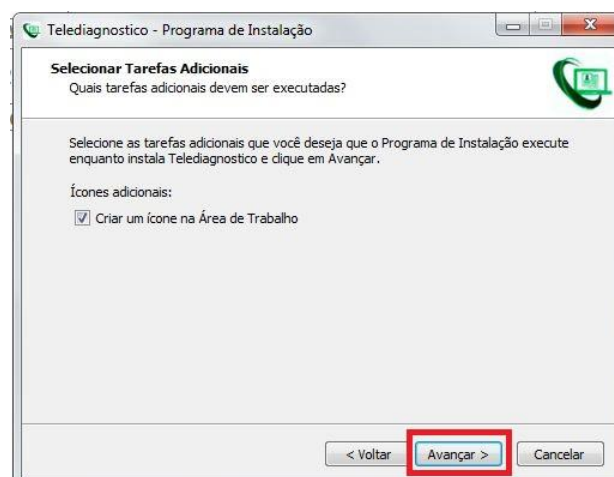

7. Clique em “Instalar”.

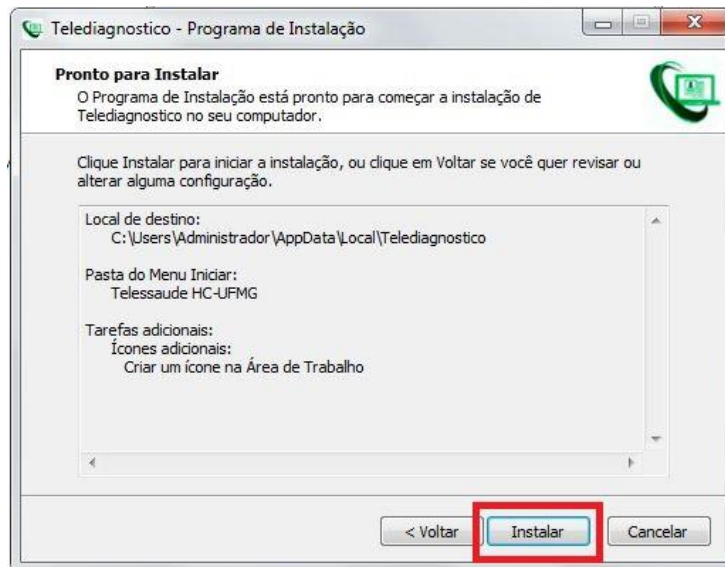


8. Clique em “Concluir”.




9. Abra o Telediagnostico clicando no ícone na área de trabalho.



10. Digite seu login e senha.

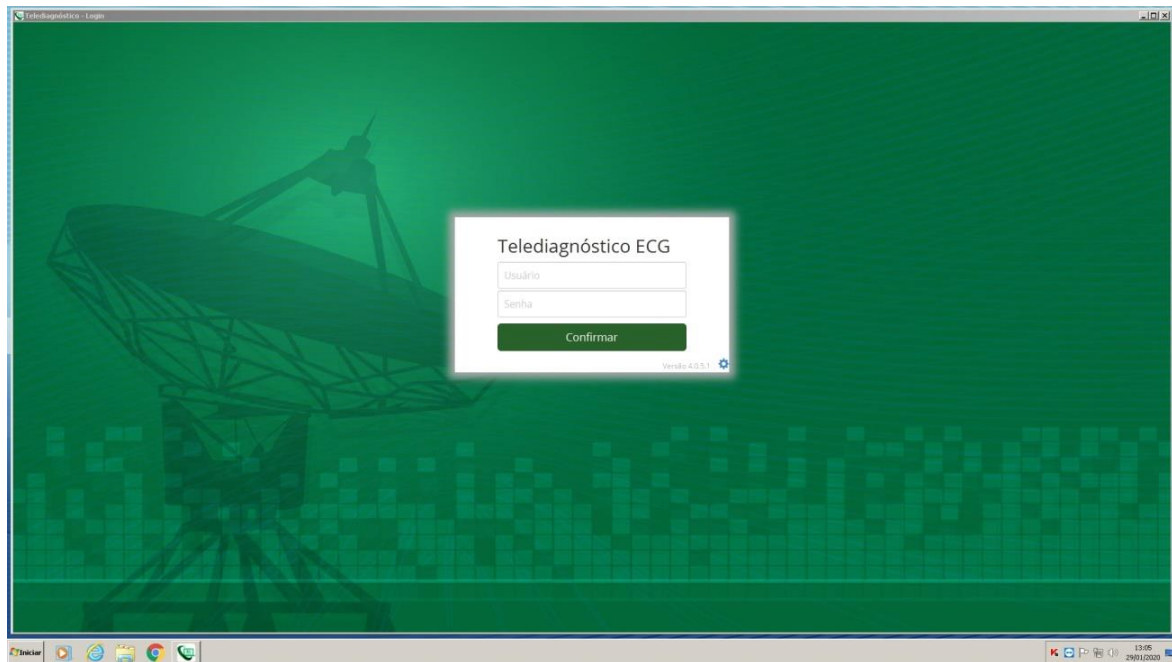


11. Selecionar o ECG PC instalado.

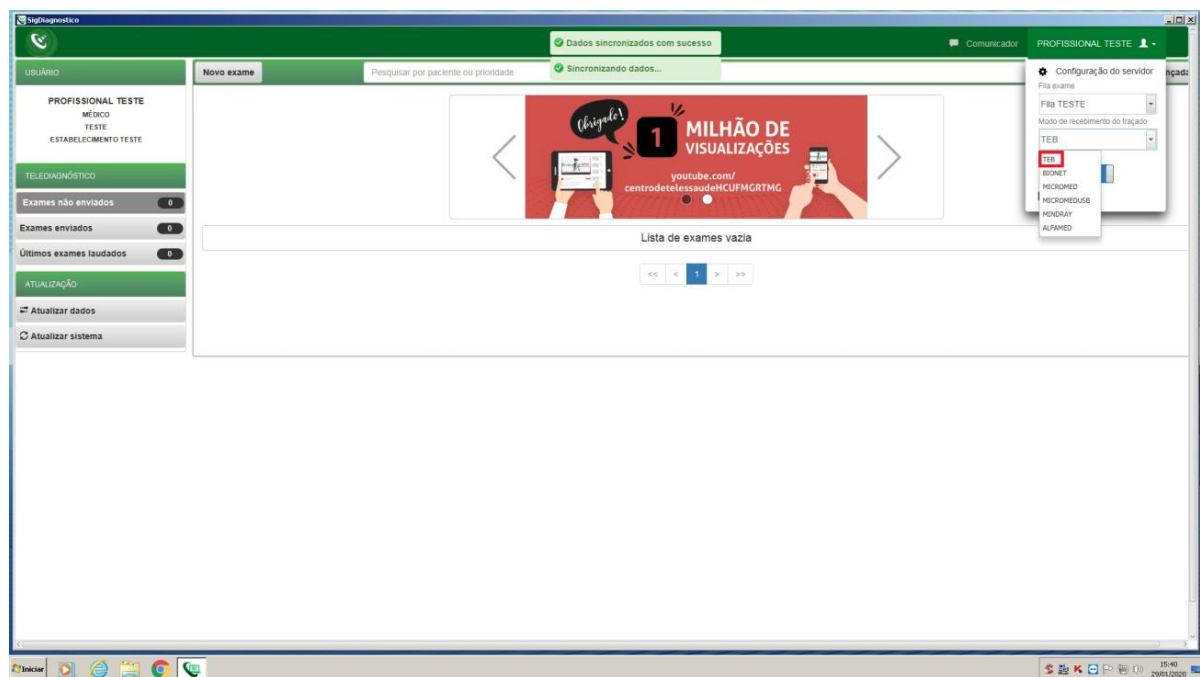


Manual de Instalação do WinCardio 7.0


1. Acesse o link http://telessaude.hc.ufmg.br/suporte/Wincardio/Wincardio_7_USB.exe
2. Após o download clicar no arquivo e iniciar a instalação:

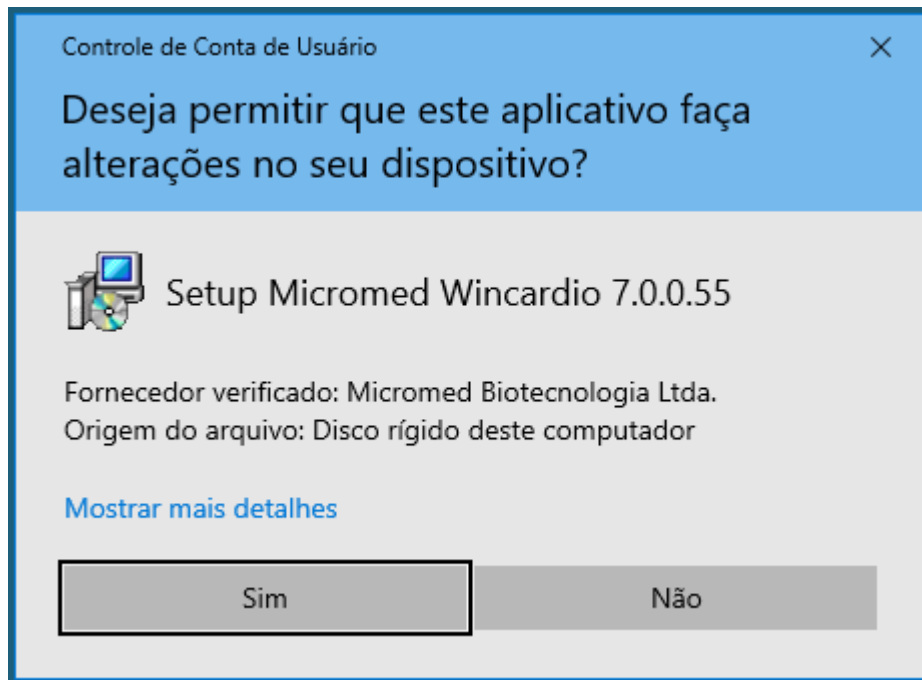


3. Clique em “Avançar”.

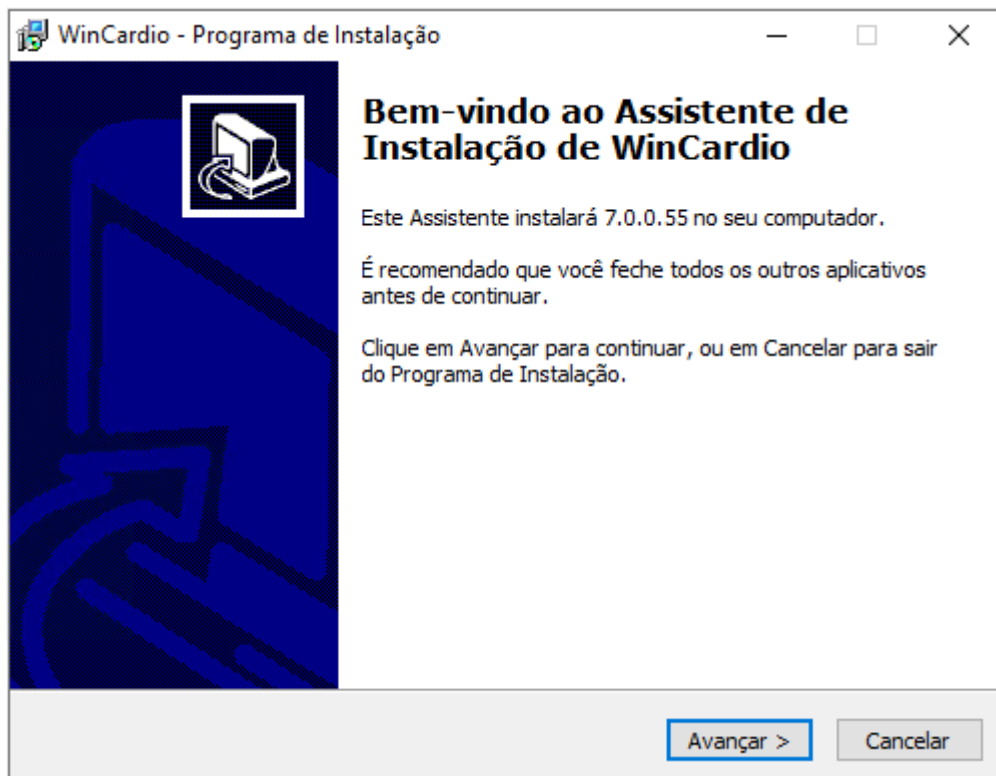


4. Clique em “Eu aceito os termos do Contrato” e depois em “Avançar”.

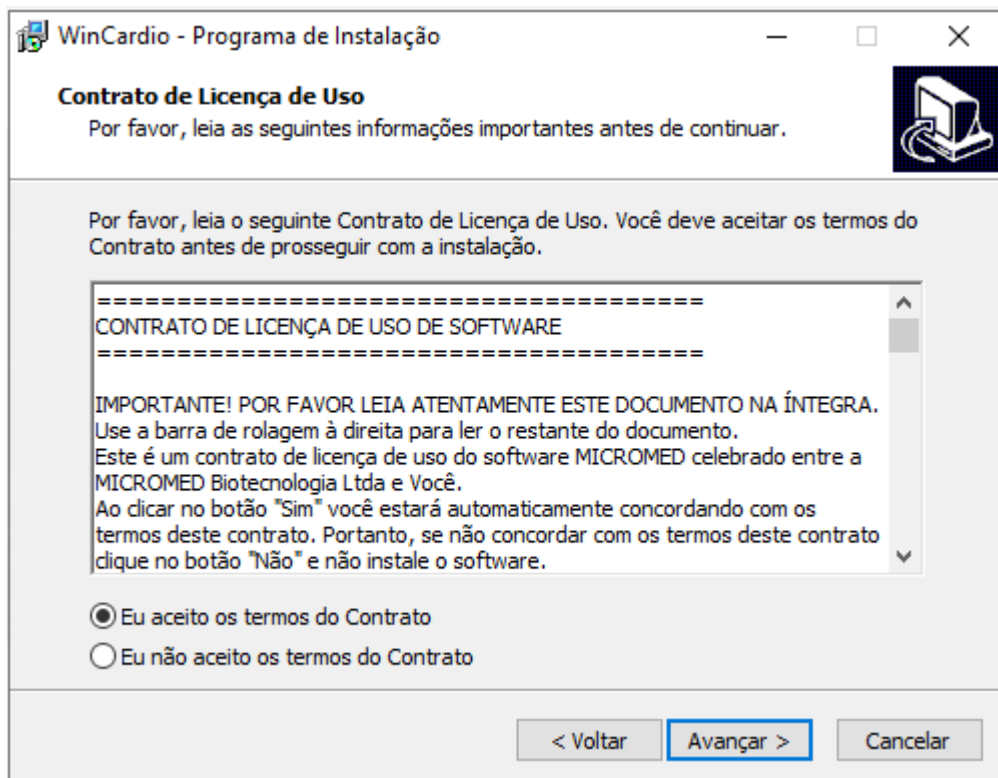


5. Clique em “Avançar”.

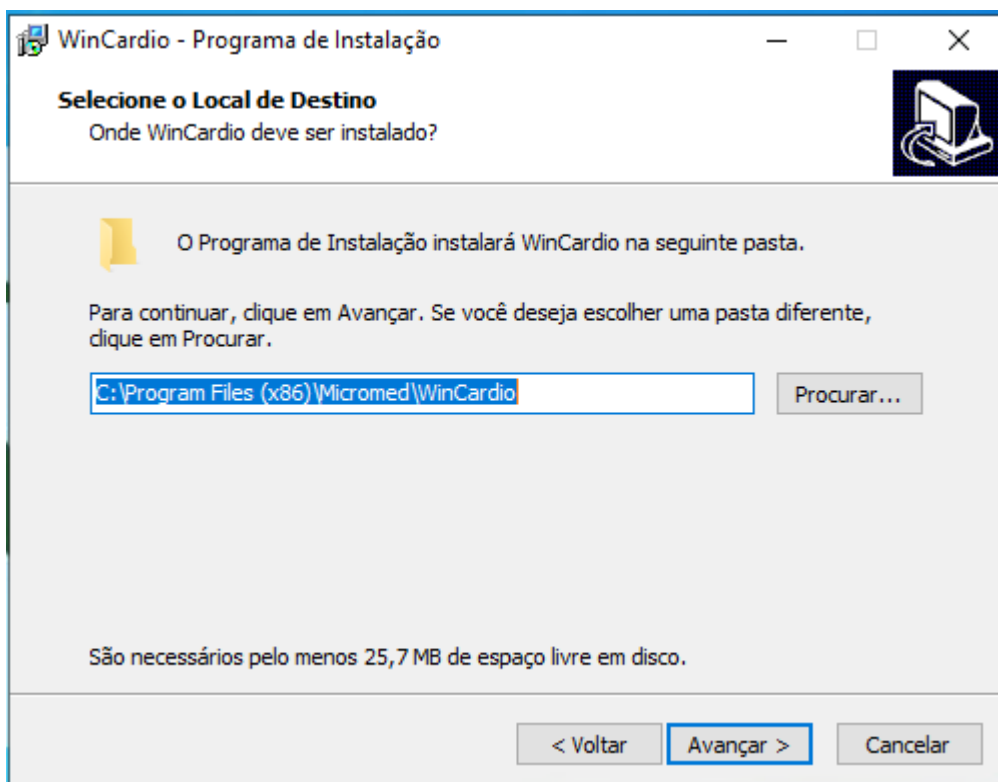


6. Clique em “Avançar”.

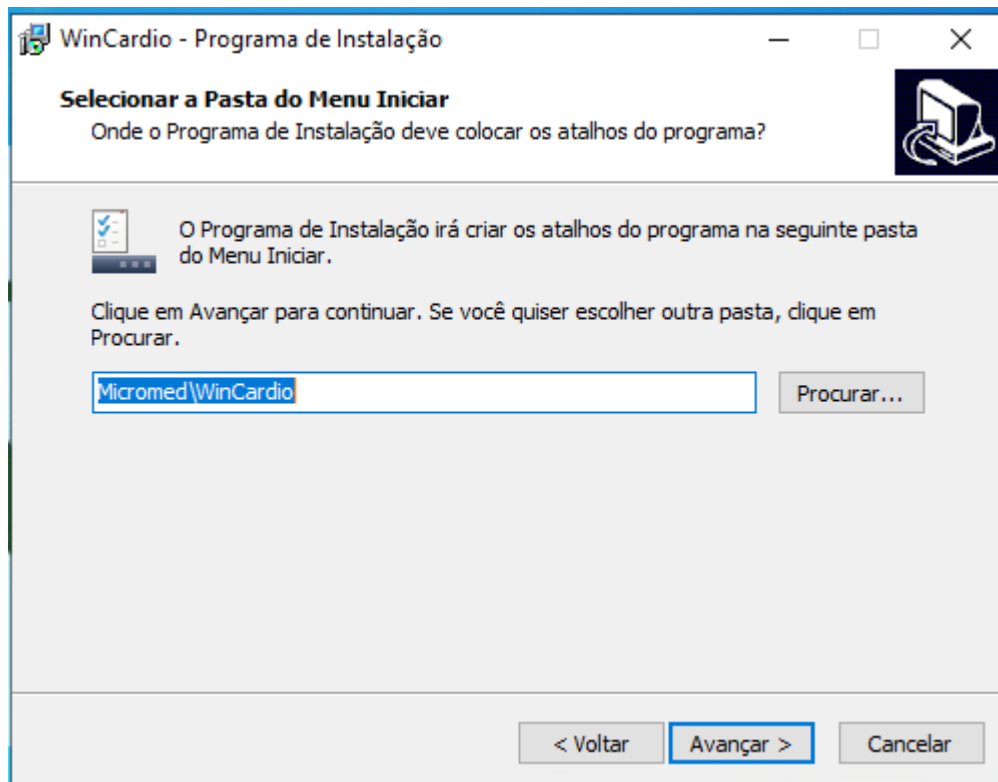


7. Clique em “Avançar”.

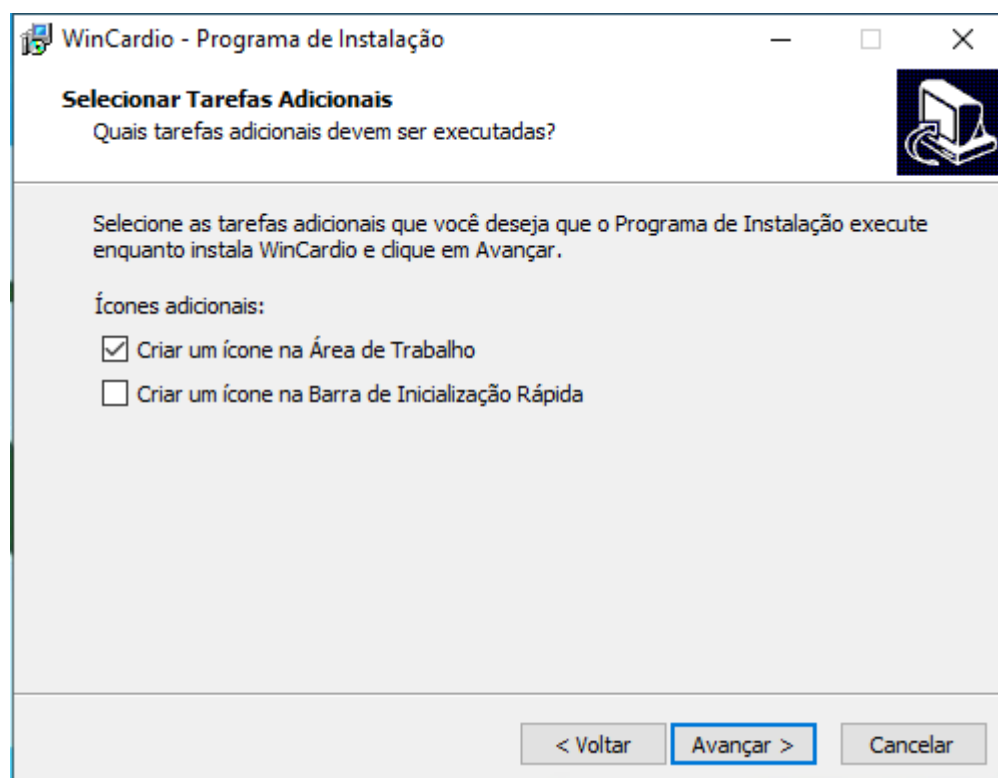

8. Clique em “Instalar”.

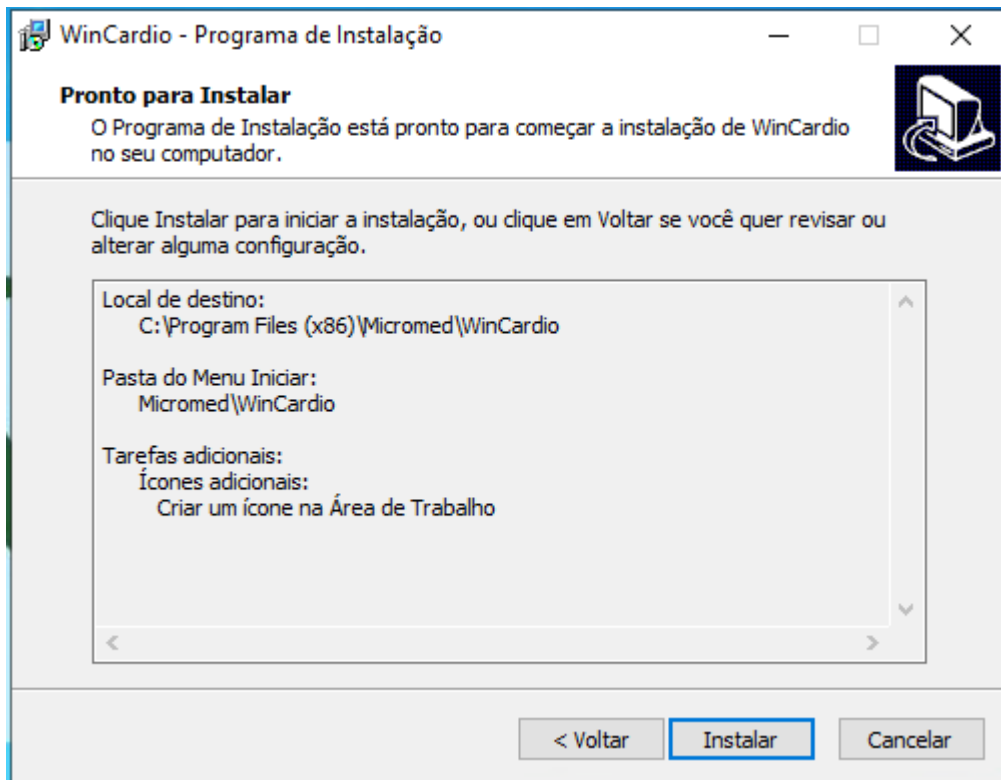

9. Aguardar o término da instalação e clicar em “OK”.

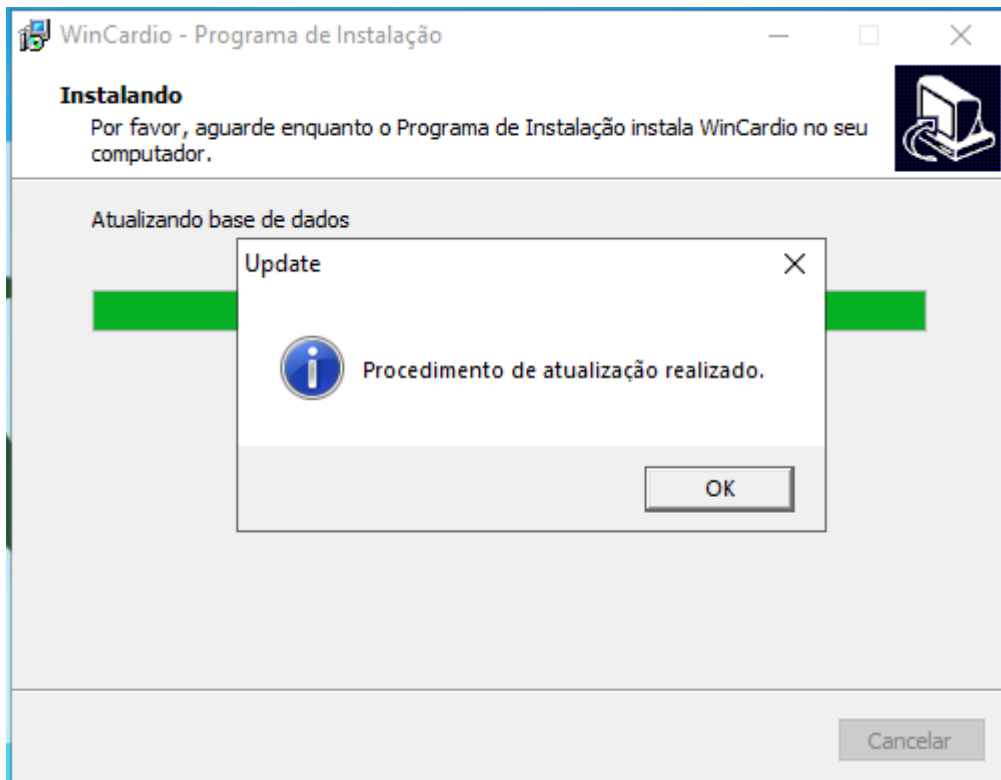

10. Desmarcar a caixa Executar WinCardio e clicar em “Concluir”.

