

# MANUAL DO SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO


## MANUAL DO INSTALADOR

### TELEDIAGNÓSTICO ECG TEB

FEVEREIRO DE 2020




1. Acesse o link <http://www.telessaude.hc.ufmg.br/suporte/Sigtel/> e faça o download do aplicativo Telediagnostico.exe.

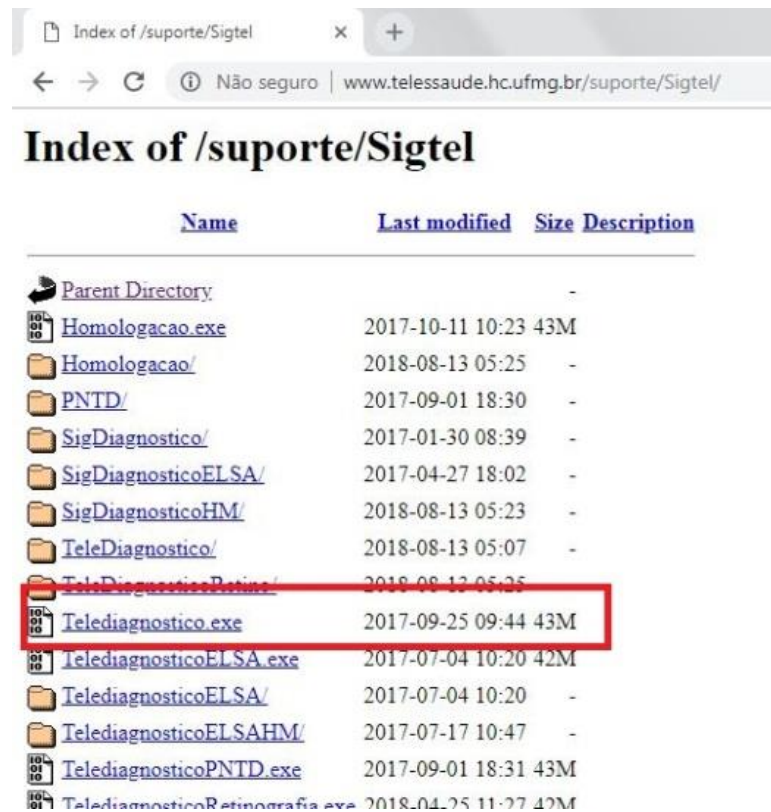


2. Execute o aplicativo Telediagnostico.exe.

Nome	Data de Modificação	Tipo	Tamanho
Telediagnostico.exe	21/09/2018 10:59	Aplicativo	43.903 KB


3. Clique em “Avançar”.

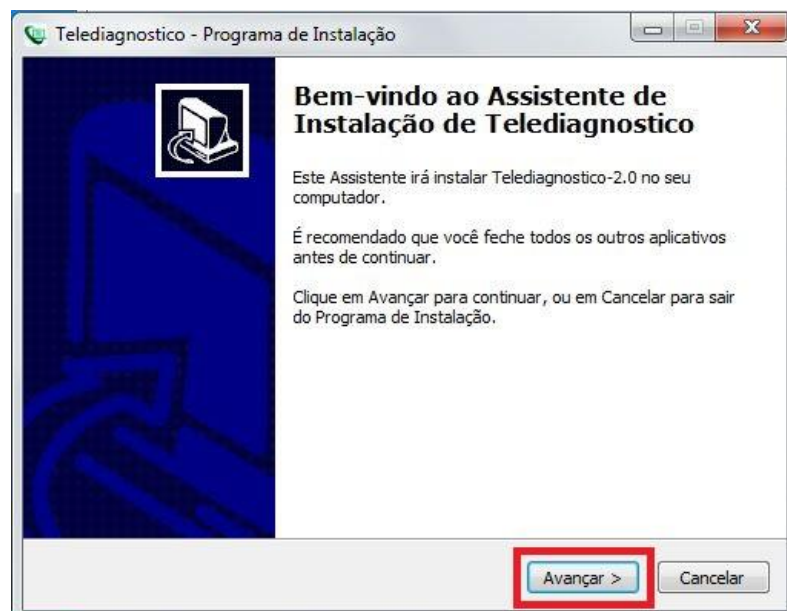


4. Clique em “Avançar”.

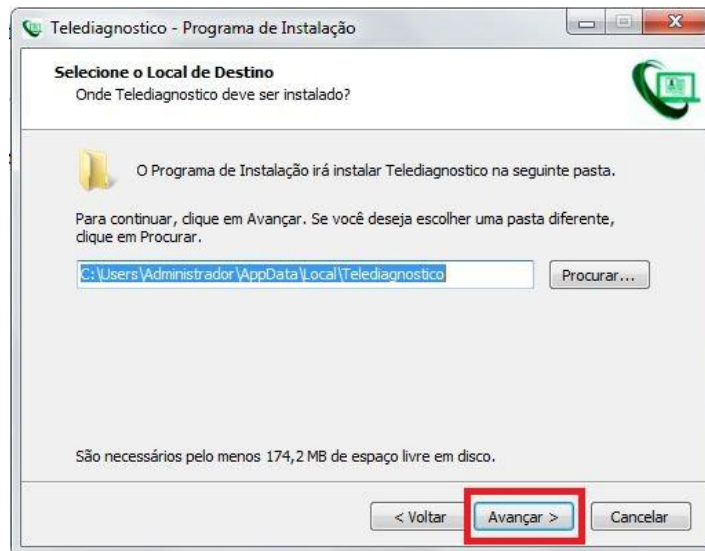


5. Clique em “Avançar”.

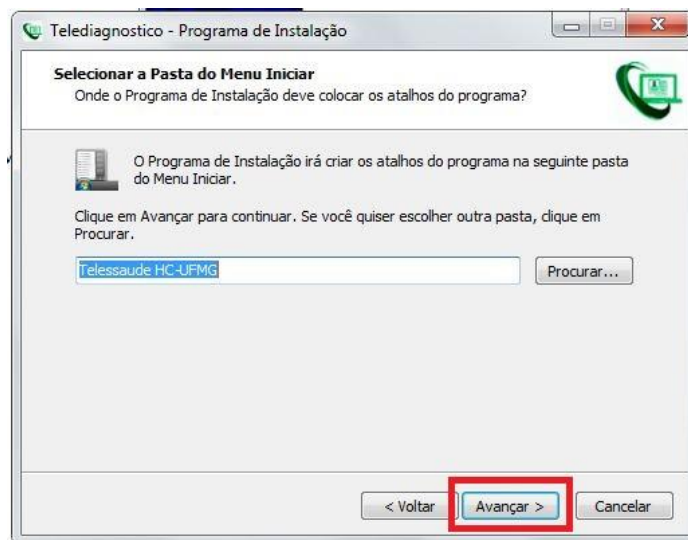

6. Clique em “Avançar”.

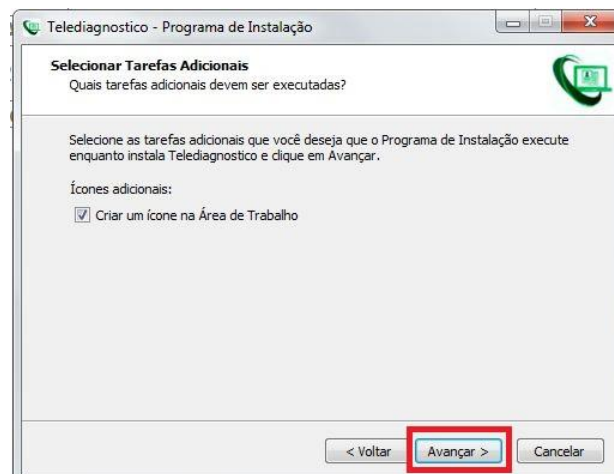

7. Clique em “Instalar”.

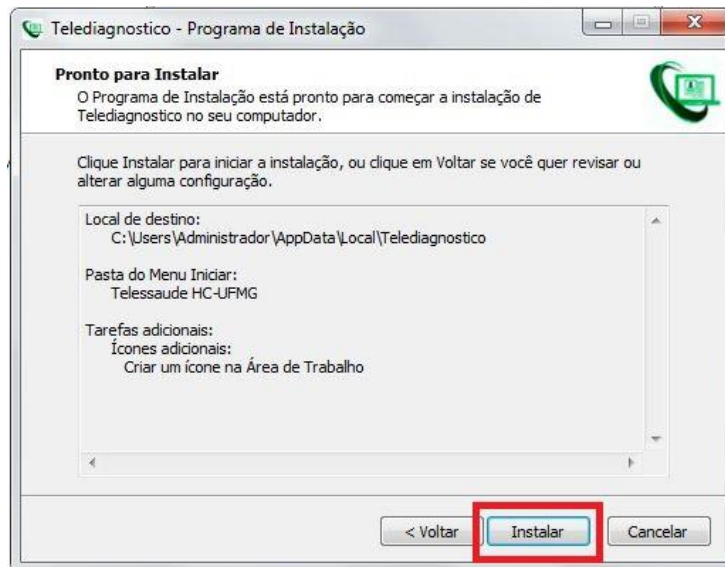


8. Clique em “Concluir”.




9. Abra o Telediagnostico clicando no ícone na área de trabalho.



10. Digite seu login e senha.

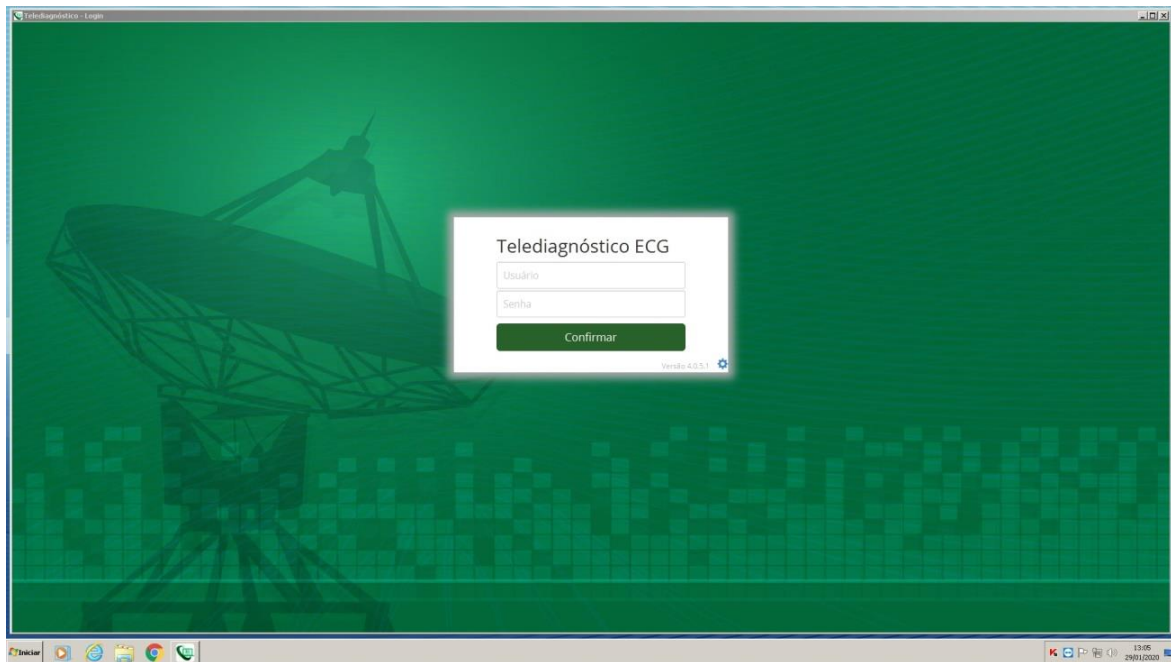


11. Selecionar o ECG PC instalado.

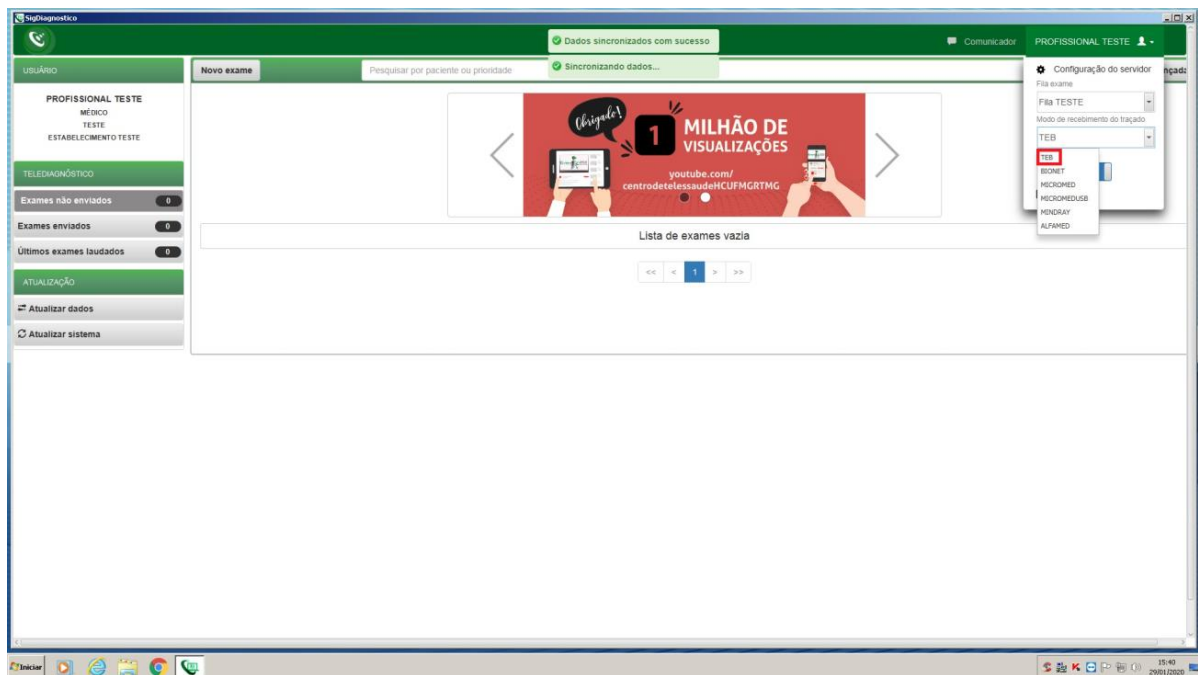


## Manual de Instalação do TEB


1. Conecte o cabo USB no ECG e em uma porta USB do computador.
2. Após iniciar a instalação do drive do dispositivo, clique em “Avançar”.

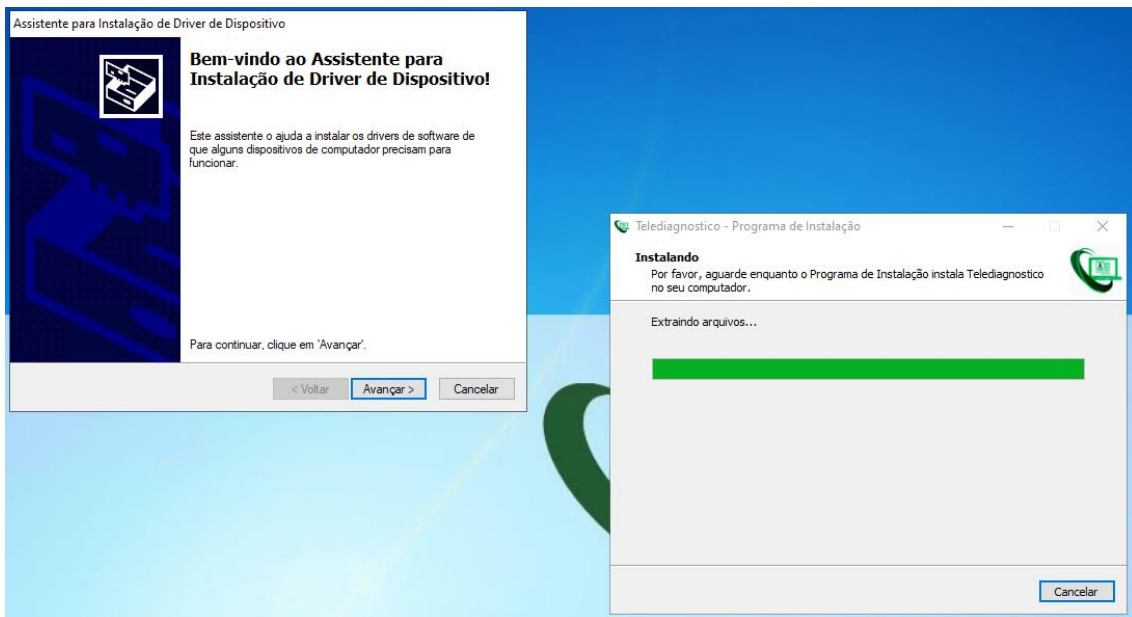

3. Clique em “Aceitar” os termos e depois em “Avançar”.

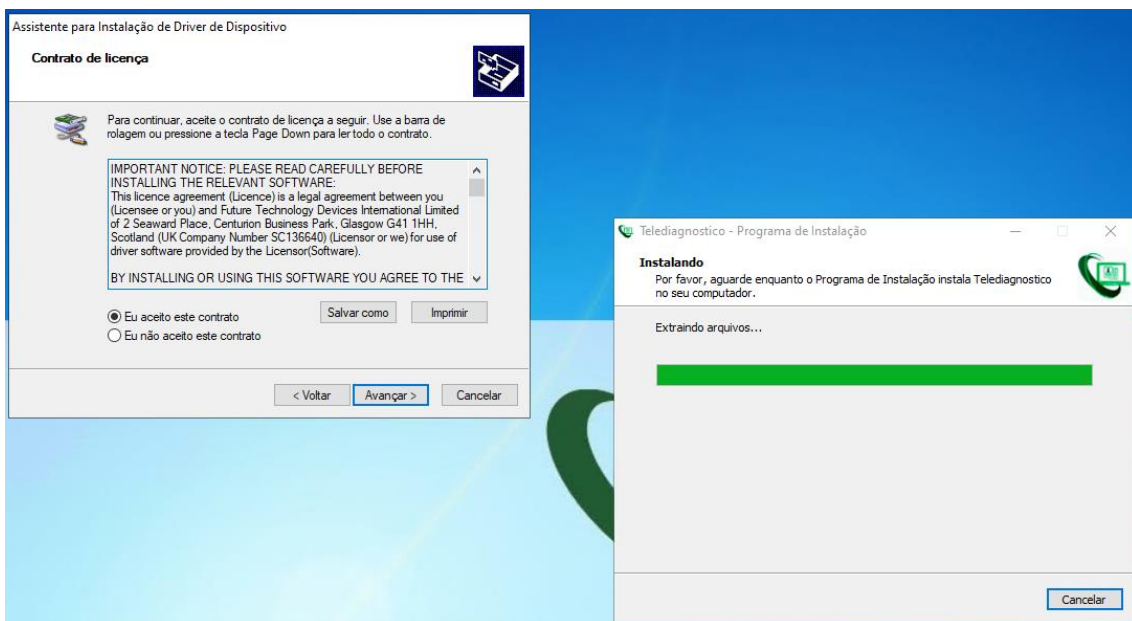

4. Clique em “Concluir”.

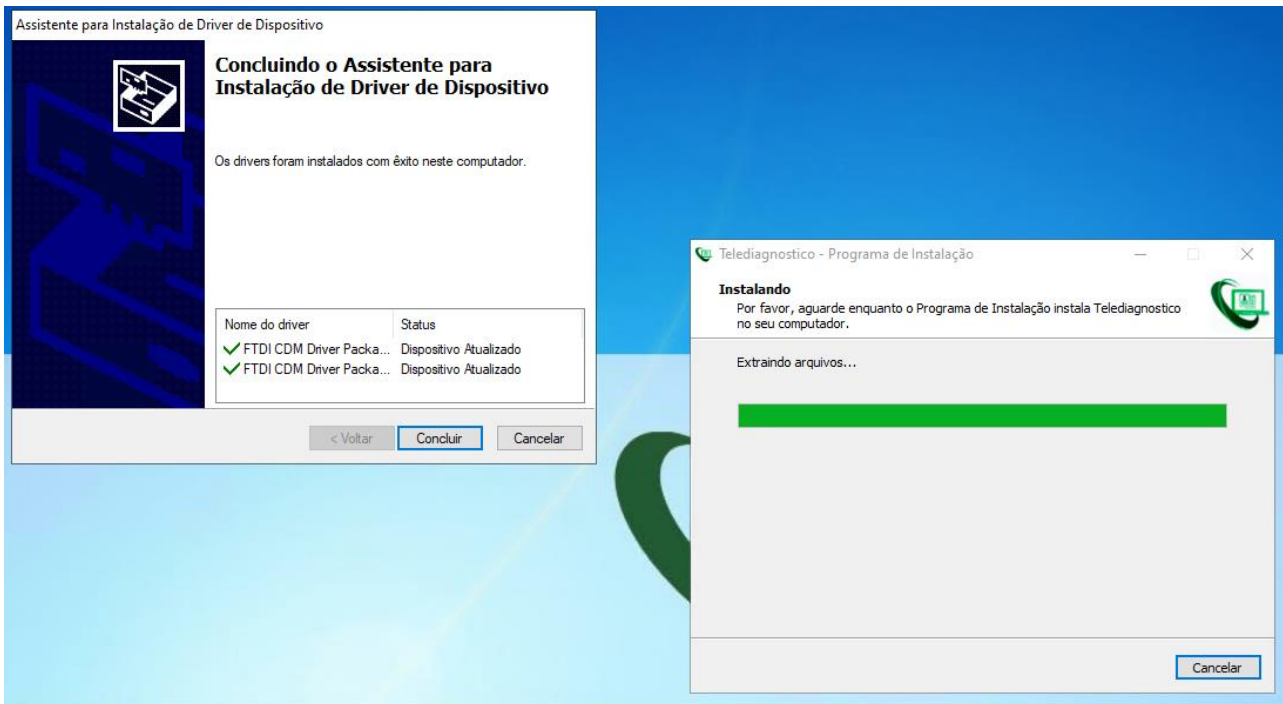

5. Após a instalação, clique em “Conclçuir”.

