

MANUAL DO SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO


MANUAL DO INSTALADOR

TELEDIAGNÓSTICO

FEVEREIRO DE 2020



1. Acesse o link <http://www.telessaude.hc.ufmg.br/suporte/Sigtel/> e faça o download do aplicativo Telediagnostico.exe.

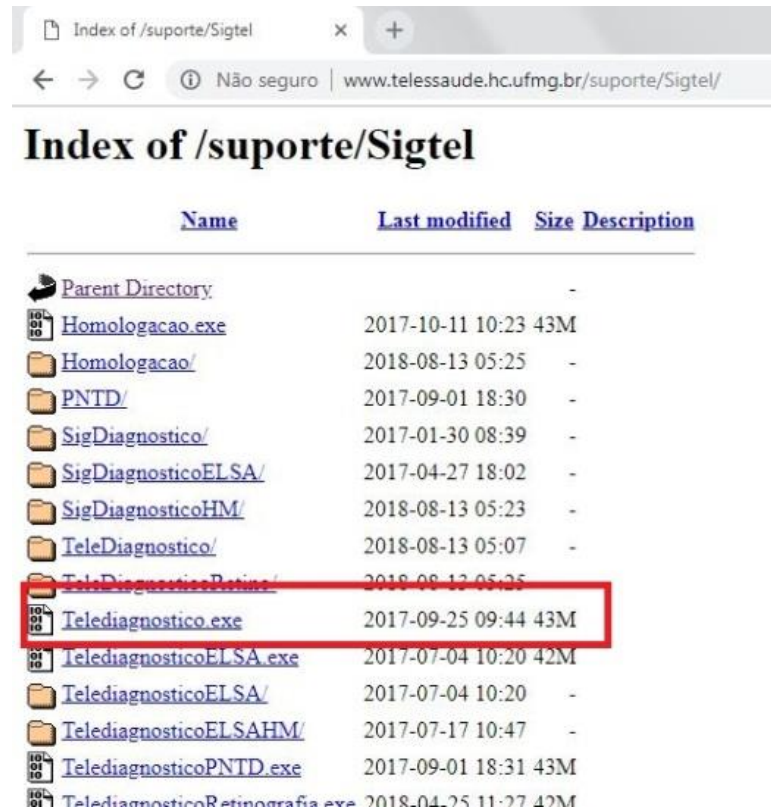


2. Execute o aplicativo Telediagnostico.exe.




3. Clique em “Avançar”.




4. Clique em “Avançar”.

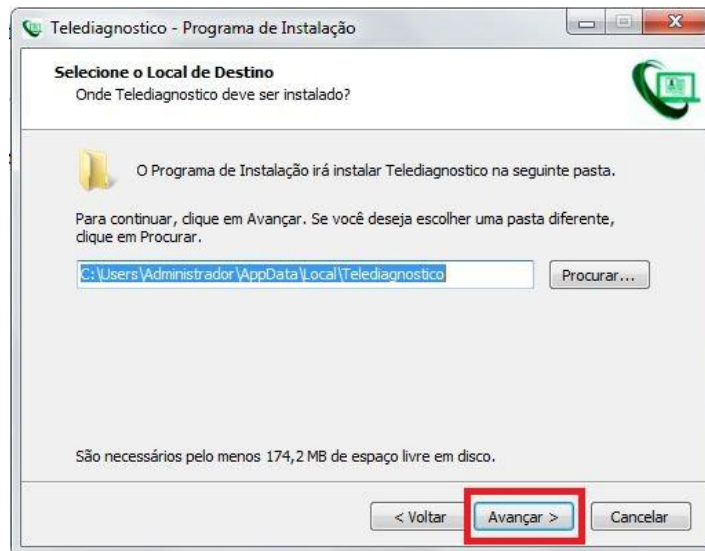


5. Clique em “Avançar”.

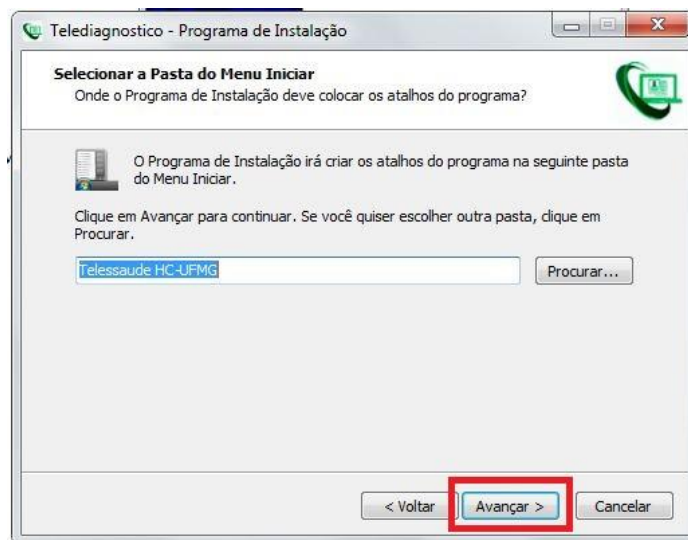

6. Clique em “Avançar”.

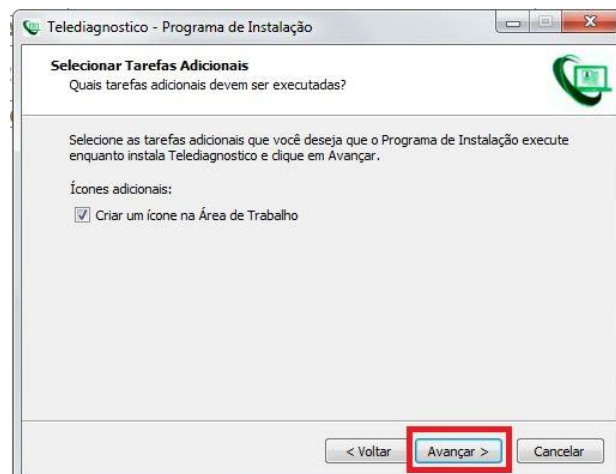

7. Clique em “Instalar”.

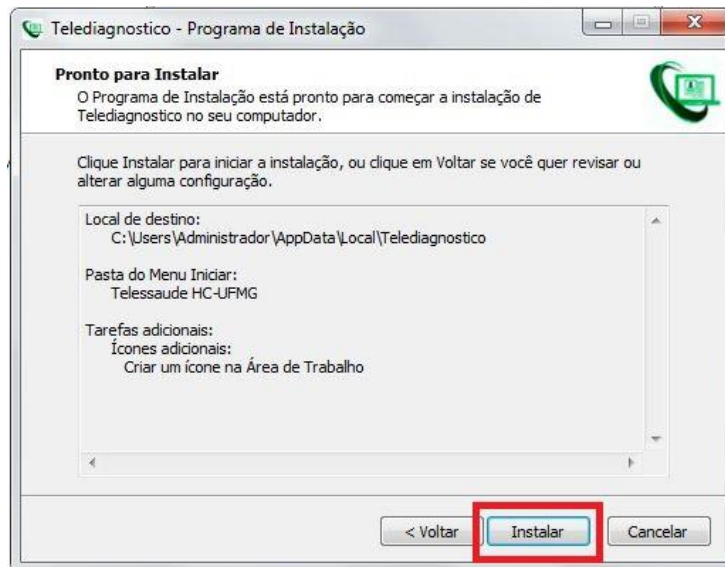


8. Clique em “Concluir”.



9. Abra o Telediagnostico clicando no ícone na área de trabalho.



10. Digite seu login e senha.

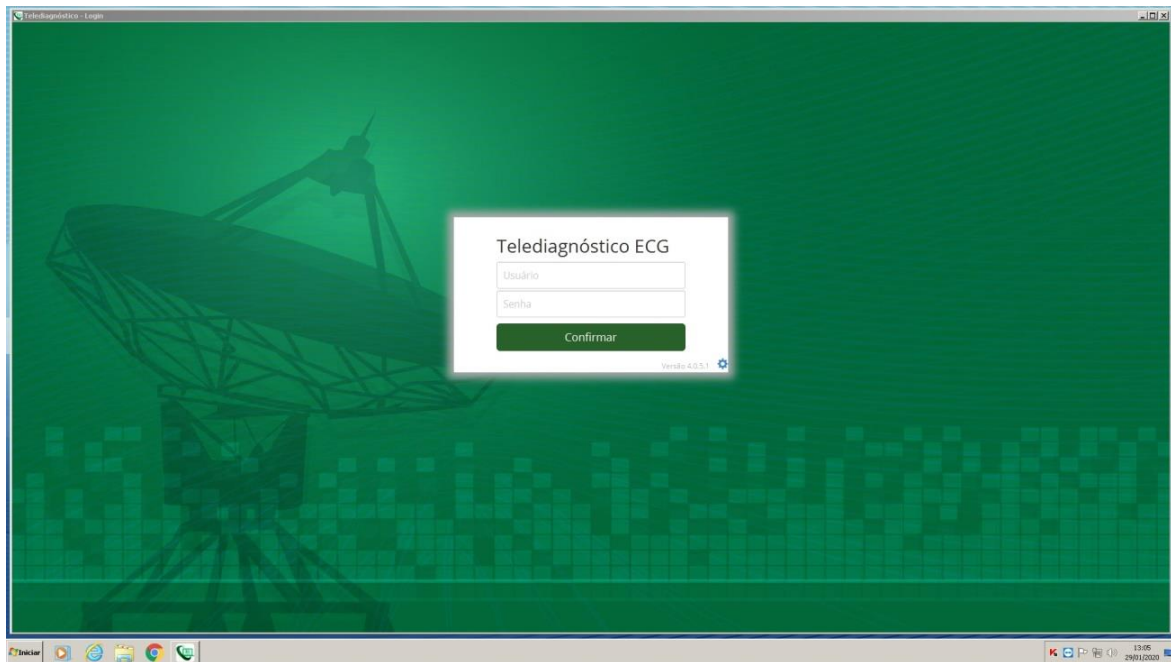

11. Selecionar o ECG PC instalado.

