

Manual do Sistema de Telediagnóstico

Manual de Instalação



ECG TELEDIAGNÓSTICO

Maio 2023

MANUAL DE INSTALAÇÃO – TELEDIAGNÓSTICO

1 INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo descrever o passo a passo para a instalação do *software* Telediagnóstico para compartilhamento de traçados de eletrocardiograma para emissão de laudos.

2 DOWNLOAD E INSTALAÇÃO

O download do programa deve ser feito através do link: <https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/central-de-downloads/>


a. Após acessar o link a página abaixo será exibida

Central de Downloads

/ INÍCIO > SERVIÇOS > CENTRAL DE DOWNLOADS /


Instaladores	Telessaude
<ul style="list-style-type: none">• HW ECGV6• MICROMED WINCARDIO V.5• MICROMED WINCARDIO V.7• MICROMED WINCARDIO V.10• MICROMED WINCARDIO V.11• TEB ECG PC• WINSPIRO PRO	<ul style="list-style-type: none">• APARELHOS HOMOLOGADOS• INSTALADOR TRANSFERENCIA• TELEDIAGNOSTICO• TELEDIAGNOSTICO ELSA• TRANSFERÊNCIA UPA (BH)

b. Clicar em “Telediagnóstico” na lista de programas de “Telessaúde”.

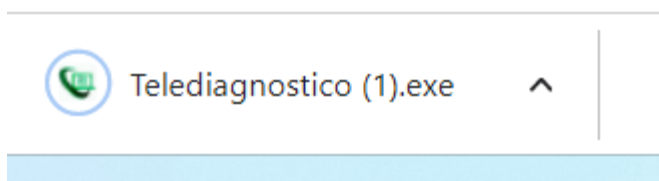


O arquivo será baixado e aparecerá para execução.

c. Executar o programa.

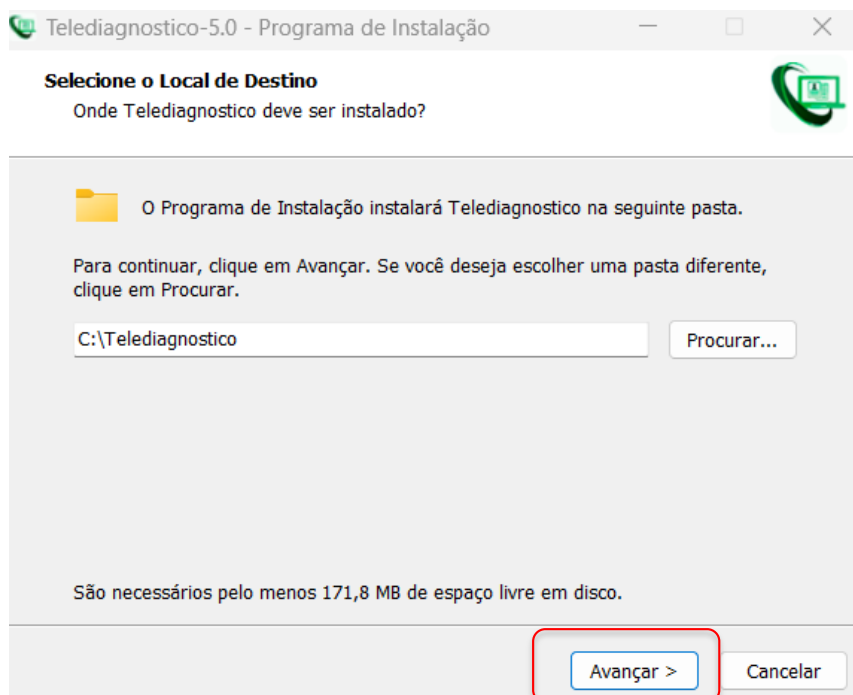

Instalar o programa e criar atalho na **Área de Trabalho**.

d. Clicar em "Concluir" ao final da instalação.

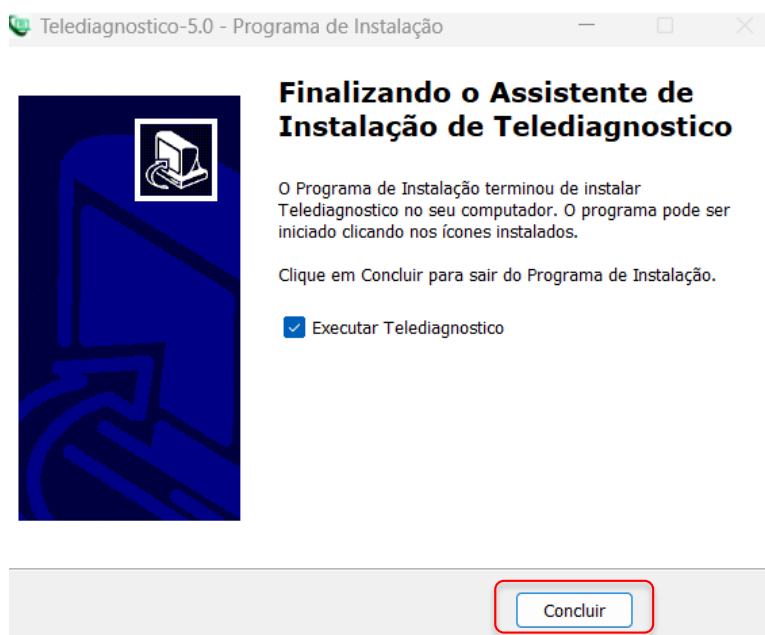

Ao concluir o programa será executado e estará pronto para uso.


3 PRIMEIRO EXAME

- i. Abrir o software **Telediagnóstico** (ícone na área de trabalho).




Telediagnóstico


- ii. Realizar login no sistema com usuário e senha de cadastro.

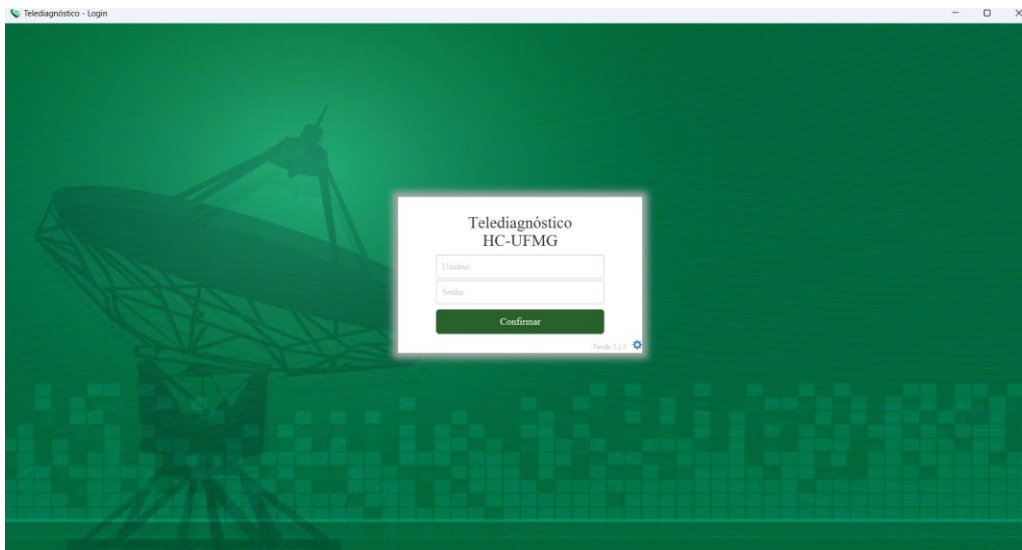

- iii. Selecionar o Município e o Estabelecimento e, logo em seguida, “Confirmar”.

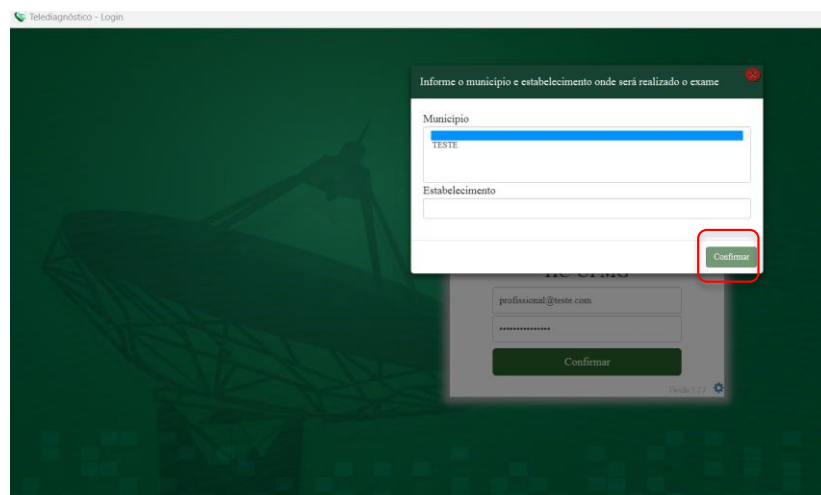

iv. Abrir a aba de "Configurações do Servidor".

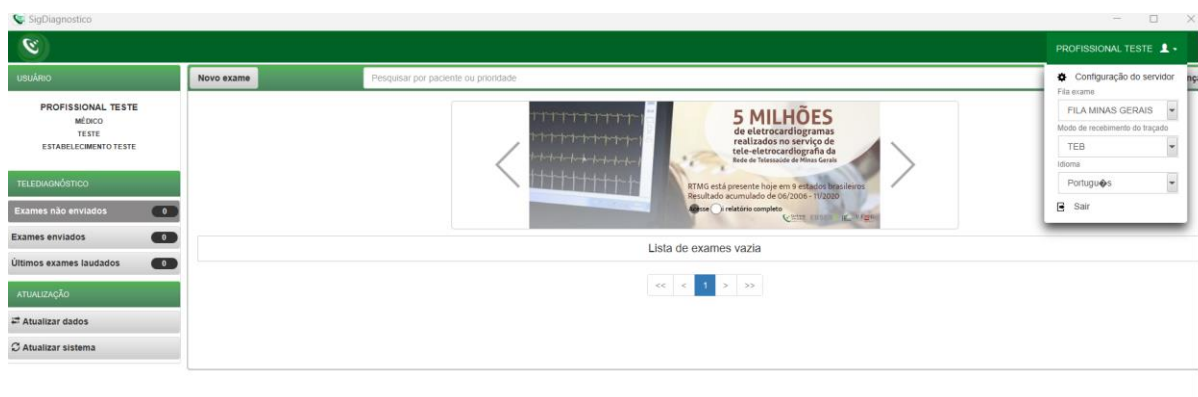

→ Selecionar a fila do exame e o modo de recebimento do traçado de acordo com o município e o aparelho de Eletrocardiograma disponível na unidade, respectivamente.

→ Feito isso, o sistema estará pronto para uso e captura e envio dos exames.

v. Clicar em "Novo exame" e preencher os dados do paciente e solicitante.

vi. Preencher os **Dados Clínicos** do paciente até o momento de selecionar "Receber Traçado".

The screenshot shows a web application interface for a medical exam. The main content area is divided into several sections:

- Medicamentos em uso:** A list of checkboxes for various medications including AAS, Clopidogrel, Amiodarona, Estatina, Outros, Digoxina, Inibidor de ECA ou BRA, Hipoglicemiante oral, Diuréticos, Insulina, Bloqueador de cálcio, and Betabloqueador. The 'Nenhum' (None) option is checked.
- Comorbidades, fatores de risco e história progressa:** A list of checkboxes for medical conditions such as HAS, Diabetes mellitus, Dislipidemia, Obesidade, Doença de Chagas, AVC prévio, Infarto prévio, Angioplastia prévia, Revascularização miocárdica prévia, História familiar de doença coronariana, Tabagismo, Doença pulmonar obstrutiva crônica, and Doença renal crônica. The 'Nenhum' option is checked.
- Marca-passo:** A section for 'Uso de marca-passo' with radio buttons for 'Sim' and 'Não'.
- Observações:** A large text area for notes.

At the bottom right, there are three buttons: 'Cancelar' (red), 'Anterior' (orange), and 'Receber Traçado' (green), with the latter being highlighted by a red box.

- A forma de recebimento e envio do traçado dependerá do eletrocardiograma utilizado no local.
- Para instalações e configurações do equipamento consultar os manuais e links para download disponíveis na página da web.

Manuais: <https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/treinamentos/>

Programas: <https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/central-de-downloads/>

4 CONCLUSÃO

Espera-se que, ao término das instruções, o programa Telediagnóstico capture as ondas de eletrocardiograma e as envie com qualidade para o sistema de laudos no Centro de Telessaúde.

4.1 Contatos

Suporte técnico Telessaúde:

Corporativo: (31) 9 9875-1349

E-mail: ihelp.telessaude@gmail.com

Site: <https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/treinamento/>