Manual do Sistema de Telediagnóstico Manual do Solicitante

Telediagnóstico ALFAMED RITMUS 1200 Janeiro de 2024



1 Apresentação

A Rede de Telessaúde de Minas Gerais (RTMG) é uma rede de assistência e pesquisa em saúde composta por sete instituições universitárias públicas de Minas Gerais (UFMG, UFU, UFTM, UFJF, UFSJ, UFVJM e UNIMONTES), coordenada pelo Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG).

Telediagnóstico, de acordo com o Ministério da Saúde, é um serviço "que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias geográfica e temporal" (Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011).

Os serviços de telediagnóstico em cardiologia da RTMG incluem laudos de eletrocardiogramas (ECG), laudos de MAPA e Holter e discussão de casos clínicos online, sendo o tele-eletrocardiograma a principal modalidade de exame de telediagnóstico realizado.

O reconhecimento precoce do acometimento cardíaco em condições crônicas, como na hipertensão, e o reconhecimento de condições que exigem o tratamento rápido, como o infarto agudo do miocárdio e as arritmias cardíacas, são aplicações úteis e eficazes da tele-eletrocardiografia. A redução dos encaminhamentos de pacientes e a possibilidade de comunicação entre os profissionais dos locais remotos com os grandes centros são também potenciais benefícios do telediagnóstico.

Horário de funcionamento

O serviço tem funcionamento 24 horas por dia, de segunda a domingo, sendo o horário do especialista definido antecipadamente de acordo com a demanda do serviço e disponibilidade do profissional. Todos os eletrocardiogramas são analisados no mesmo dia e os casos definidos como urgência seguem um fluxo diferenciado e são respondidos em poucos minutos, pois o tempo de laudo é muitas vezes primordial para implementar medidas para reduzir a mortalidade.



2 Como acessar o Sistema Telediagnóstico ALFAMED RITMUS 1200

Para utilização desse sistema, é necessário que você o tenha instalado em seu computador. Após a instalação, será criado um ícone na sua área de trabalho para acessá-lo.



2. Aguarde a inicialização:





3. Preencha com seu login e senha de acesso.

Clique em "Confirmar":

Telediagnóstico HC-UFMG		
Usuário		
Senha		
Confirmar		
	Versão 5.2.6	¢

Fig.3 - Login

4. Informe o nome do **Município** e **Estabelecimento** onde será realizado o exame:

Informe o município e estabelecimento onde será realizado o exame	
Município	
Estabelecimento	
Con	firmar

Fig.4 - Dados do município e estabelecimento

5. No menu do usuário, é possível visualizar a fila de exames (conforme cadastro no sistema) e selecionar o modo de recebimento do traçado:

👽 SigDiagnostico			V - • ×
(C)			PROFISSIONAL TESTE1
USUÁRIO	Novo exame - ECG	Pesquisar por paciente ou prioridade	Configuração do servidor nça Fila exame
PROFISSIONAL TESTE1 TÉCNICO ENFREMAGEM MONTES CLAROS AGATA			FILA MINAS GERAIS Modo de recebimento do traçado TEB TEB TE8
TELEDIAGNÓSTICO			BIONET
Exames não enviados 0		Lista de exames vazia	MICROMED_USB
Exames enviados 0		<< < 1 > >>	MINDRAY
Últimos exames laudados 0			ARQUIVO
ATUALIZAÇÃO			
₽ Atualizar dados			
🗘 Atualizar sistema			

Fig.5 - Fila do exame e modo de recebimento do traçado

6. Na tela principal, selecione "Novo Exame":

😵 SigDiagnostico				
8	V			.TESTE 🛓 •
USUÁRIO	Novo exame	Pesquisar por paciente ou prioridade	Pesquisar	Pesquisa avançada
PROFISSIONAL TESTE MÉDICO BELO HORIZONTE ESTABELECIMENTO TESTE		Lista de exames vazia		
TELEDIAGNÓSTICO				
Exames não enviados 0				
Exames enviados				
Últimos exames laudados				
ATUALIZAÇÃO				
😅 Atualizar dados				
🗘 Atualizar sistema				



7. Na tela de **Identificação**, selecione + para incluir novo paciente ou clique na **Iupa** \bigcirc para pesquisar um paciente já cadastrado:

👽 Novo Exame								
8								
Usuário	Paciente		Realização				Código	
PROFISSIONAL TESTE MÉDICO	Paciente*		/		+ Q	Prioridade		Eletiva •
	Data de nascimento			Sexo				
ESTABLE IMENTO TESTE	Exame fisico							
Identificação	Peso			Altura				
Indicação	IMC			Pressão arteri	ial (mmHg)			
Dados clínicos	Solicitante							
Traçado	Nome *				Q	CRM		
	Estabelecimento	Nenhum profissional selecie	onado			Data de solicitação	21/06/2018	62
	Envio							
	Enviar para central de exam	nes?	Sim *					
							Ca	ncelar Próximo

Fig.7 - Incluir e pesquisar paciente

8. Após selecionar + (Fig.7), para incluir um novo paciente, digite o CPF e faça a busca pelo **CAD-SUS** ou informe os dados solicitados. Alguns deles são obrigatórios: nome do paciente, data de nascimento e sexo.

Para salvar as informações, clique em "Salvar":

Adicionar/Editar Paciente				
CPF			E	Buscar pelo CAD-SUS
Nome *				
Nome da mãe				
Data de nascimento *	7	Sexo *	Selecione	
CNS		Celular		
Registro				<u> </u>
			Pesquisar Paciente	Limpar Salvar

Fig.8 - Adicionar paciente

9. Após selecionar a **lupa** Q (Fig.7), informe o nome do paciente e clique em Pesquisar . Clique em Selecionar para o paciente desejado ou Editar para alterar dados. Caso faça a edição dos dados, ao final, clique em "**Salvar**".

Pesquisar Paciente								Θ
Nome	Paciente							
CNS			CPF				6	
					Novo Paciente	Limpar	Pesquisar	
Nome	Nascimento				Sexo			
Pesquisar Paciente		¢	ъ					8
Nome								
CNS			CPF					
					Novo Paciente	Limpar	Pesquisar]
Nome		Nascimento		Sexo	6			
					Editar S	elecionar		
Adicionar/Editar Pacie	ente		V					8
cor								
Nome *						Buscar p	elo CAD-SUS	
Nome da mãe								
Data de nascimento *		(ink)	Sexo *		Selecione			
CNS			Celular					
Registro							6	
					Pesquisar Pacien	ite Limpa	r Salvar	

10. É possível solicitar o cadastramento de novo paciente por meio do botão "**Novo Paciente**".

O botão Limpar	permite reinicia	ar a pesquisa.		
Pesquisar Paciente				8
Nome	teste			
CNS		CPF		
			Novo Paciente Limpar Pesquisar	
Nome	Nascimento	Sexo		
			Editar Selecionar	
		« 1 »		

Fig.9 - Pesquisar paciente

11. Ainda na tela de **Identificação**, informe a prioridade do exame. É possível selecionar **Eletiva**, **Preferencial** ou **Urgente**. Caso seja selecionado **Urgente**, um novo campo "**Motivo de urgência**" deverá ser preenchido obrigatoriamente de forma sucinta.

rio	Paciente						
PROFISSIONAL TESTE1 TÉCNICO ENFERMAGEM	Paciente*			+ Q	Prioridade		Eletiva
	Data de nascimento		Sexo			(Eletiva
↓	Exame fisico						Preferencial Urgente
entificação	Peso		Altura				
dicação	IMC		Pressão arter	ial (mmHg)			1
dos clínicos	Solicitante						
açado	Nome *			Q	Registro Profissional		
	Estabelecimento				Data de solicitação	18/04/2023	
	Envio						

Fig.10 - Prioridade do exame

•	Paciente*	+ Q	Prioridade Urgente •
	Motivo de urgência *		
	Data de nascimento	Sexo	

Fig.11 - Prioridade do exame

O critério de urgência é estabelecido pelo solicitante, porém consideramos como justificativa para laudo URGENTE as seguintes condições clínicas:

- Arritmias cardíacas;
- Dor torácica com suspeita de síndrome coronariana aguda ou dissecção de aorta;
- Crise hipertensiva;
- Insuficiência cardíaca descompensada;
- Suspeita de tromboembolismo pulmonar;
- Dispneia aguda;
- Pacientes com suspeita de falha em marca-passo artificial.

Nessa mesma tela, informe a pressão arterial do paciente, peso e altura. O sistema calculará o IMC automaticamente. Esses itens não são obrigatórios, entretanto são importantes informações a serem passadas.

Exame fisico		
Peso	Altura	
IMC	Pressão arterial (mmHg)	

Fig.12 - Exame Físico

12. As informações do solicitante são obrigatórias segundo o Ministério da Saúde. Clique na **lupa** e escolha um **Estabelecimento**. Clique em "**Pesquisar**" e selecione na lista exibida, o profissional desejado.

· _			Selo	AW		
elecimento	um profissional selecionado		•	Data de solicitação	29/06/2018	2
	F	ig.13 - Pesquisar	solicitan	te		
Pesquisar S	olicitante					(
Nome						4
Estabelecime	nto ESTABELECIM	IENTO TESTE				-
Registro		UF re	egistro			
				Limpa	ar Pesquisa	ar
Nome		Função	Doc	Ação		
PROFISSION	IAL TESTE	MÉDICO		Seleció	onar 🔶	

Fig.14 - Escolha do estabelecimento e solicitante

13. Informe a data de solicitação do exame:

Solicitante					
Nome *		Q	CRM		
Estabelecimento	Nenhum profissional selecionado	~	Data de solicitação	21/06/2018	5

Fig.15 - Data de solicitação do exame

14. É necessário selecionar se deseja ou não enviar imediatamente o exame para a Central de Exames. Caso seja selecionada a opção de não enviar, ele poderá ser enviado posteriormente utilizando-se o botão de "**Enviar Exame**" na tela principal, no menu de "**Exames não enviados**".

Envio		
Enviar para central de exames?	Sim •	
	Sim	
	Não	Cancelar Proximo

Fig.16 - Envio para a Central de exames

Clique em Cancelar para encerrar o exame sem gravar ou em Próximo para prosseguir com o exame.

15. Na tela de **Indicação**, clique em um ou mais motivos de realização do exame. Caso seja **Outro**, preencha o campo texto à frente com o motivo:

8					
Usuário	Motivo de realização do exame*				Clique em " Cancelar " para
PROFISSIONAL TEST MÉDICO TESTE ESTABELECIMENTO TESTE	Rotina Risco cirúrgico Outro	Dor torácica Sincope	Dispneia	🔲 Palpi	encerrar o exame sem gravar, no botão "Anterior " para voltar à
Identificação	Dor no momento do exame				página anterior ou em " Próximo " para
Indicação Dados clínicos	Há dor no momento do exame?		® Não	Sim	prosseguir com o exame.
K	Suspeita de infarto agudo do mio	cárdio			
Informe se há dor no momento do exame ou suspeita	Há suspeita de infarto agudo de	o miocárdio?	Não	Sim	ar Anterior Próximo
de infarto agudo do miocárdio.					



16. Na próxima tela, serão informados os Dados Clínicos:



Fig.18 - Dados clínicos

Verifique se o equipamento de eletrocardiograma está devidamente conectado ao computador.

Clique em Cancelar , Anterior ou Receber Traçado

17. Para iniciar o exame, na tela inicial do equipamento, clique no botão "Novo".



Fig.19 - Tela inicial

18. Consequentemente, a tela que exibirá os traçados irá aparecer. Clique em "Envio" para realizar o registro das ondas.

				-
25 mm/s 10 mm/mV	AC Auto	3x4+1 Monual	Envio - Pe	

Fig.20 - Tela para captura

Manual do Sistema de Telediagnóstico ALFAMED RITMUS 1200 Rede de Telessaúde de Minas Gerais 19. Ao final, uma mensagem com os dizeres <u>**"O processo foi concluído"**</u> aparecerá e o upload dos exames será realizado para o sistema de Telediagnóstico.

20. Repita esse processo para envio de todas as amostras (mínimo 3, máximo 4). Ao final, clique em "Finalizar".

Receber Exame					x c		
Paciente: profissional test							
Aguardando a gravação dos registros							
1.	20230404-152813-2 xml						
2.	20230404-152848-2 xml			×			
	20230404-152933-2 xml			×			
	* Dados do FTP Dados do FTP Usuário:	. IP: 10.10.10.204 Por ecg Senha: 123456	rta: 21	* Maximo de 4 registros	alizar		

Fig.21 - Tela final

21. A tela de início do Telediagnóstico será exibida com o exame registrado na lista de enviados.

